


BIOTITUS® Derma

Back to a Natural Care

BIOTITUS[®]

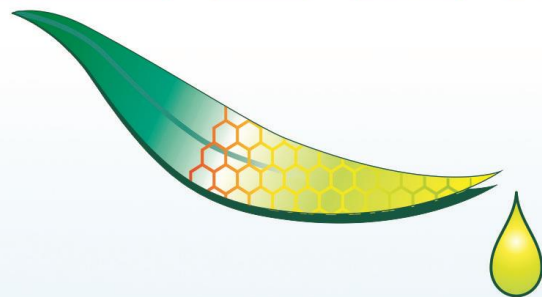

Derma



Produse pe bază de ingrediente naturale
Dispozitive medicale clasa II b, în conformitate cu Directiva 93/42/EEC

* Studiu clinic pe 49 de pacienți desfășurat în perioada ianuarie – septembrie 2012, conform SR EN ISO 14155

Distribuit de DISPOMEDFARM—www.dispomedfarm.ro—office@dispomedfarm.ro

tel: 0342.220.200—fax: 0342.220.201—mobil: 0737.245.510/0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

S.C. DISPOMEDFARM S.R.L.

CUI **RO28222902**; J51/126/2011

Loc. **Oltenița**, jud. **Călărași**

Str. **Stadionului**, nr. **2**

Tel. **0342.220.200**, Fax **0342.220.201**

Mobil: **0747.136.546** / **0737.245.510**

E-mail: **office@dispomedfarm.ro**

Web: **www.dispomedfarm.ro**

SCURT ISTORIC

Societatea comerciala **DISPOMEDFARM SRL** a fost infiintata in anul 2011 avand ca obiect principal de activitate "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" - cod CAEN 4646, cu sediul social in localitatea Oltenita, str. Stadionului, nr. 2, judet Calarasi, J51/126/2011, CUI RO28222902, avand un capital social subscris si varsat in valoare de 125.000 lei.

DISPOMEDFARM SRL este distribuitor la nivel national al produselor din gama



Produsele din gama



sunt dispozitive medicale din clasa II b,
conform Directivei 93/42/EEC,
modificata prin Directiva 2007/47/EEC,
cu marcaj european de conformitate
“CE 1868”.

PREZENTARE



Tub unguent 20 ml

Tub unguent 50 ml

Tub unguent 100 ml

Cutie unguent 500 ml

Cutie comprese impregnate (contine 10 comprese ambalate individual)

COMPOZITIE



- brevetata international -

A close-up photograph of a vibrant green leaf, likely from a plant like a lemon or lime, covered in numerous clear, glistening water droplets. The leaf is set against a dark, blurred background, making the green color and the droplets stand out. The droplets vary in size and are scattered across the surface of the leaf, which has a visible vein pattern.

ulei de masline,
ulei de floarea-soarelui,
ceara,
camfor,
colofoniu,
ulei de ricin,
bismut

Tratamentul local al:

- PLAGILOR ACUTE,
- PLAGILOR CRONICE,
- AFECTIUNILOR DERMATOLOGICE.



PROMOVAREA produselor



Promovarea produselor
BIOTITUS® Derma s-a efectuat in
spitale prin sustinerea de
prezentari si punerea la dispozitie
de produse in vederea testarii
acestora.

Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bucuresti 2011



Spitalul Militar Timisoara, 2011



S-a reusit astfel semnarea de contracte cu spitale, dintre care amintim:

- Spitalul de Chirurgie Plastica si Arsuri Bucuresti
- Spitalul Clinic Fundeni Bucuresti
- Spitalul Militar "Carol Davila" Bucuresti
- Spitalul Clinic Fundeni Bucuresti
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
- Spitalul Judetean Dr. Constantin Opris Baia Mare
- Spitalul Clinic Grigore Alexandrescu Bucuresti
- Spitalul Clinic de Urgenta pt. Copii Louis Turcanu Timisoara
- Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Au fost distribuite gratuit plicuri
continand cate un tub de 50 ml
BIOTITUS® Derma la un numar de
5.000 cabinete medicale
individuale.

Promovarea in **camine de batrani si alte unitati spitalicesti**: Au fost distribuite gratuit plicuri continand mostre la un numar de:

- 110 centre de batrani,
- 150 unitati sanitare spitalicesti,
- 70 clinici private.

PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- Conferinta Nationala de Medicina Familiei,
Bucuresti, martie 2012



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- ROMMEDICA 2012,

Bucuresti, aprilie 2012



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- Conferinta Nationala “Ziua Medicului de Familie”,
Arad 2012



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Conferinta Managementul Escarelor,*
Bucuresti 2012



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



*- Conferinta Anuala a Asociatiei Chirurgilor Plasticieni din Romania,
Sinaia 2011*



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



*- Conferinta Anuala a Asociatiei Chirurgilor Plasticieni din Romania,
Sinaia 2012*



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



*- Conferinta Anuala a Asociatiei Chirurgilor Plasticieni din Romania,
Timisoara 2011*



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară,*
Bucuresti 2011



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Conferinta Nationala de Ortopedie si Traumatologie,*
Timisoara 2012



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Ar-Medica,*
Arad 2014



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



Pe plan international, produsele
BIOTITUS® Derma
sunt cunoscute in tari precum
Germania, Italia, Austria, Statele
Unite ale Americii, Brazilia.

PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Congresul Uniunii Mondiale a Societatilor de Vindecare a Plagilor (WUWHS), Japonia, Yokohama 2011*



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Medica Dusseldorf,*

Germania, 2011



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Medica Dusseldorf,*

Germania, 2012



PROMOVARE D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Medica Dusseldorf,*

Germania, 2013



PROMOVARE

D. CONFERINTE SI TARGURI DE SPECIALITATE



- *Medica Dusseldorf,*

Germania, 2014



Jurmed - Jurnal de Sanatate

BIOTITUS®
Derma

Ajutorul tau
in plagile acute sau cronice

ÎN CURAND
UN NOU AMBALAJ
AL PRODUSELOR

Fiecare dintre noi ne-am confruntat într-un moment al vieții cu o afecțiune cutanată. Fie că este vorba de neliplitele julturi ale copilăriei, acneea adolescenței sau plăgile cronice ale maturității (ulcere varicoase, etc.) pielea noastră este afectată frecvent.

Gama de produse BIOTITUS® Derma vine în întâmpinarea nevoilor dvs și vă oferă soluții în toate fazele de vindecare ale plăgilor. Produsele BIOTITUS® Derma sunt recomandate în:

- Tratamentul local al plăgilor acute, precum arsuri de gradul I, II a și II b, escoriații, ulcerări și alte plăgi traumatice;
- Tratamentul local al plăgilor cronice: ulcere varicoase, escare și ulcerările piciorului diabetic;
- Tratamentul local în afecțiuni dermatologice: eczeme umede, dermatite de contact;
- Tratamentul local al cicatricilor patologice (hipertrofice și cheloide).

Datorită faptului că produsele au o bază de unguent natural, având în componența lor: ceară de albine, ulei de măsline, ulei de ricin, ulei de floarea soarelui, camphor, colofonia și Bismuth, au un grad mare de acceptabilitate.

PROPRIETĂȚI TERAPEUTICE:

- **Proprietăți antiinflamatorii;**
- **Debridare antioctolică** - este asigurată de Unguentul BIOTITUS® Derma prin folosirea împreună cu un pansament occlusiv;
- **Prevină și controlează infecția plăgii**
- **Asigură mediul umed** caracterizat de o hidratare constantă a plăgii, temperatură și pH;
- **Asigură formarea unui nou epiteliu de calitate** și favorizează regenerarea pielii.

Cazuri tratate cu BIOTITUS® Derma



BIOTITUS®
Derma

Ajutorul tau
in plagile acute sau cronice

ÎN CURAND
UN NOU AMBALAJ
AL PRODUSELOR

Gama de produse BIOTITUS® Derma vine în întâmpinarea nevoilor dvs și vă oferă soluții în toate fazele de vindecare ale plăgilor. Produsele BIOTITUS® Derma sunt recomandate în:

- **Tratamentul local al plăgilor acute, precum arsuri de gradul I, II a și II b, escoriații, ulcerări și alte plăgi traumatice;**
- **Tratamentul local al plăgilor cronice: ulcere varicoase, escare și ulcerările piciorului diabetic;**
- **Tratamentul local în afecțiuni dermatologice: eczeme umede, dermatite de contact;**
- **Tratamentul local al cicatricilor patologice (hipertrofice și cheloide).**

Datorită faptului că produsele au o bază de unguent natural, având în componența lor: ceară de albine, ulei de măsline, ulei de ricin, ulei de floarea soarelui, camphor, colofonia și Bismuth, au un grad mare de acceptabilitate.

Cazuri tratate cu BIOTITUS® Derma

În data de 31.10.2012 a fost finalizată investigația clinică "Utilizarea BIOTITUS® Derma în tratamentul arsurilor, escarelor, ulcerelor de gambă și al piciorului diabetic" desfășurată la SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANȚA sub îndrumarea Investigatorului Clinic Principal și Coordonator: Prof. Univ. Dr. ION BORDEIANU și în cadrul SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA sub îndrumarea Investigatorului Clinic Principal: Conf. Dr. HORIA PĂRĂNESCU în urma căreia s-a concluzionat următoarele:

"În cazul ulcerărilor de gambă și diabetice tratate cu BIOTITUS® Derma, faptul că după 6 zile de tratament cu BIOTITUS® Derma, volumul mediu al acestor plăgi s-a redus la jumătate din cel inițial, iar după 56 zile, s-a redus cu 98%, iar suprafața medie s-a redus la jumătate din cea inițială, după 30 de zile de tratament, iar după 56 zile, aceasta reprezenta 15% din cea inițială, demonstrează performanțele produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul acestor tipuri de plăgi cronice.

De asemenea, o ulcerăție s-a vindecat după 17 zile de tratament, alta după 22 zile, a treia după 31 de zile, a patra ulcerăție, după 64 zile de tratament."

În paralel, produsul a fost folosit și în Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din București, Spitalul de Chirurgie Plastică și Arsuri București, Spitalul Clinic de Urgență din Timișoara, Spitalul Constantin Opriș din Baia Mare, precum și în cadrul altor spitale din țară.

Ulcerăție picior diabetic, țesut necrozat aproximativ 45 %, durată tratamentului 2 luni.



BIOTITUS®
Derma

Ajutorul tau
in plagile acute sau cronice

ÎN CURAND
UN NOU AMBALAJ
AL PRODUSELOR

Fiecare dintre noi ne-am confruntat într-un moment al vieții cu o afecțiune cutanată. Fie că este vorba de neliplitele julturi ale copilăriei, acneea adolescenței sau plăgile cronice ale maturității (ulcere varicoase, etc.) pielea noastră este afectată frecvent.

Gama de produse BIOTITUS® Derma vine în întâmpinarea nevoilor dvs și vă oferă soluții în toate fazele de vindecare ale plăgilor. Produsele BIOTITUS® Derma sunt recomandate în:


- **Tratamentul local al plăgilor acute, precum arsuri de gradul I, II a și II b, escoriații, ulcerări și alte plăgi traumatice;**
- **Tratamentul local al plăgilor cronice: ulcere varicoase, escare și ulcerările piciorului diabetic;**
- **Tratamentul local în afecțiuni dermatologice: eczeme umede, dermatite de contact;**
- **Tratamentul local al cicatricilor patologice (hipertrofice și cheloide).**

Datorită faptului că produsele au o bază de unguent natural, având în componența lor: ceară de albine, ulei de măsline, ulei de ricin, ulei de floarea soarelui, camphor, colofonia și Bismuth, au un grad mare de acceptabilitate.

PROPRIETĂȚI TERAPEUTICE:

- **Proprietăți antiinflamatorii;**
- **Debridare antioctolică** - este asigurată de Unguentul BIOTITUS® Derma prin folosirea împreună cu un pansament occlusiv;
- **Prevină și controlează infecția plăgii**
- **Asigură mediul umed** caracterizat de o hidratare constantă a plăgii, temperatură și pH;
- **Asigură formarea unui nou epiteliu de calitate** și favorizează regenerarea pielii.

Cazuri de arsuri tratate cu BIOTITUS® Derma

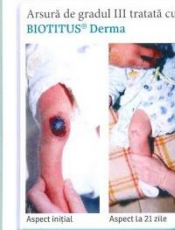

Comenzile se pot face la:

SC DISPOMEDFARM SRL
Bd. 1 Decembrie, Nr. 35,
Oțenița, Călărași
Tel: 0747.136.546; 0737.245.510
Fax: +40 342 220 201
www.dispomedfarm.ro

Produsător: **SC BIOTIFARM SRL**
Str. Grigore Antipa, Nr. 3,
Timișoara, Timiș
Tel: +40 356 415 72;
Fax: +40 356 419 957
www.biotifarm.com

Comenzile se pot face la:

SC DISPOMEDFARM SRL
Bd. 1 Decembrie, Nr. 35,
Oțenița, Călărași
Tel: 0747.136.546; 0737.245.510
Fax: +40 342 220 201
www.dispomedfarm.ro

Produsător: **SC BIOTIFARM SRL**
Str. Grigore Antipa, Nr. 3,
Timișoara, Timiș
Tel: +40 356 415 72;
Fax: +40 356 419 957
www.biotifarm.com

Comenzile se pot face la:

SC DISPOMEDFARM SRL
Bd. 1 Decembrie, Nr. 35,
Oțenița, Călărași
Tel: 0747.136.546; 0737.245.510
Fax: +40 342 220 201
www.dispomedfarm.ro

Produsător: **SC BIOTIFARM SRL**
Str. Grigore Antipa, Nr. 3,
Timișoara, Timiș
Tel: +40 356 415 72;
Fax: +40 356 419 957
www.biotifarm.com

Jurmed - Jurnal de Sanatate



EFICIENȚĂ, SIGURANȚĂ ȘI CONFORT ÎN TRATAMENTUL ARSURILOR LA COPII

Arsurile termice la copii reprezintă una dintre cele mai frecvente traumatisme și constituie 10 - 20 % din totalul traumatismelor acute la vârstele pediatrice. Conform OMS, 40% dintre arsurile sunt întâlnite la copii. De asemenea, trebuie remarcat faptul că lichidele fierbinți sau la originea a aproximativ 75% dintre arsurile suferite de copii.

Copii sunt expuși riscului de arsură din cauza curiozității, înțelegerii limitate a pericolului și abilității limitate de a reacționa la contactul cu lichidul fierbinte.



Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma (Compresă impregnată și/sau tuburi cu unguent), în tratamentul arsurilor (în mediul spitalicesc sau ambulatoriu), au favorizat vindecarea acestora, după cum urmează:

Volumul arsurilor

- După 4,5 zile de tratament, volumul arsurilor s-a redus la jumătate;
- După 10 zile de tratament, volumul s-a redus cu 90%.

Vindecarea arsurilor

- Arsurile de gradul I și s-au vindecat într-un interval cuprins între 3 și 11 zile de tratament, cu o medie de 7,56 zile;
- Arsurile de gradul II și s-au vindecat într-un interval cuprins între 10 și 22 zile de tratament, cu o medie de 13,07 zile;
- Arsurile de gradul III și s-au vindecat într-un interval cuprins între 20 și 26 zile de tratament, cu o medie de 22,83 zile.

Distribuit de DISPOMEDFARM
www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro
Tel.: 0342.220.200 Fax: 0342.220.201
Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!



Caz clinic

Pacient M., 1 an și 6 luni, de sex feminin, cu domiciliul rural, a fost adusă la unitatea spitalicească, prezentând arsurile de gradul II și III, vechi de aprox. 2 de ore, cauzate de lichid fierbinte, situate în zona toracelui, mâinilor și feșelor (aprox. 60% din suprafața corpului), prezentând flicene.



Arsurile au fost curățate cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguent BIOTITUS® Derma, inițial o dată la 2 zile, ulterior, o dată la 3 zile.

De remarcat faptul că îndepărtarea pansamentului alcătuit cu BIOTITUS® Derma, s-a realizat fără a traumatiza plăgile, datorită unguentului, acesta nefiind aderent.



După 3 zile de tratament, se constată apariția tesutului de granulație, dar și îndepărtarea debris-urilor din plăgi, fapt ce asigură o vindecare optimă.



După 14 zile de tratament, arsurile s-au vindecat în totalitate.

Pe toată durata tratamentului nu au fost efectuate intervenții chirurgicale de către personalul medical; de asemenea, arsurile nu s-au infectat.

Nu sunt necesare precauții speciale în ceea ce privește produsele BIOTITUS® Derma, cu excepția cazului în care pacientul este alergic la una din componentele unguentului.



100% NATURAL
100% ROMÂNESC



Eficiența dovedită clinic* în tratamentul
PLAGILOR ACUTE, CRONICE,
AFECȚIUNILOR DERMATOLOGICE



Produse pe bază de ingrediente naturale
Dispozitive medicale clasa II b, în conformitate cu Directiva 93/42/EEC

*Studii clinice pe 49 de pacienți desfășurate în perioada ianuarie - septembrie 2012, conform SR-EN ISO 14155

Distribuit de DISPOMEDFARM — www.dispomedfarm.ro — office@dispomedfarm.ro
tel: 0342.220.200 — fax: 0342.220.201 — mobil: 0737.245.510/0747.136.546

Jurmed - Jurnal de Sanatate

ARTICOLE DE SPECIALITATE



EFICIENȚĂ, SIGURANȚĂ ȘI CONFORT ÎN TRATAMENTUL ARSURILOR

Arsurile sunt plăgi traumatice (acute), care pot fi cauzate de expunerea la căldura termică, la substanțe chimice caustice, la electrocitate, radiații, etc.

Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma (Compresă impregnată și/sau tuburi cu unguent), în tratamentul arsurilor (în mediul spitalicesc sau ambulatoriu), au favorizat vindecarea acestora, după cum urmează:

Volumul arsurilor

- După 4,5 zile de tratament, volumul arsurilor s-a redus la jumătate;
- După 10 zile de tratament, volumul s-a redus cu 90%.

Vindecarea arsurilor

- Arsurile de gradul I și s-au vindecat într-un interval cuprins între 3 și 11 zile de tratament, cu o medie de 7,56 zile;
- Arsurile de gradul II și s-au vindecat într-un interval cuprins între 10 și 22 zile de tratament, cu o medie de 13,07 zile;

Cazuri clinice

1. Pacient CI, 66 ani, de sex masculin, cu domiciliul urban, pensionar, s-a prezentat la unitatea spitalicească, prezentând o arsură de gradul I, veche de 24 de ore, produsă prin lichid fierbinte, situată în zona trunchiului anterior și a coapselor.

Inițial, arsura a prezentat o profunzime maximă de aprox. 0,3 cm și o suprafață de 3.680 cm².



Arsura a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-au aplicat comprese impregnate BIOTITUS® Derma, inițial o dată la 2 zile, ulterior, o dată la 3 zile.

După 10 zile de tratament, arsura nu a mai prezentat profunzime, devenind superficială.

După 15 zile de tratament, arsura s-a vindecat.



Distribuit de DISPOMEDFARM
www.dispomedfarm.ro; office@dispomedfarm.ro
Tel.: 0342.220.200 Fax: 0342.220.201



2. Pacient FE, 55 ani, de sex feminin, cu domiciliul rural, fără ocupație, s-a prezentat la unitatea spitalicească, prezentând o arsură de gradul II, veche de 24 de ore, produsă prin lichid fierbinte, localizată în zona antepiciorului genunchiului, bilateral.

Inițial, arsura a prezentat o profunzime maximă de aprox. 0,4 cm și o suprafață de 298 cm².

Plaga a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguentul BIOTITUS® Derma, inițial o dată la 2 zile, ulterior, o dată la 3-4 zile.

După 2 zile de tratament, arsura nu a mai prezentat profunzime, devenind superficială.

După 11 zile de tratament, arsura s-a vindecat.

Prețămăm faptul că, pe toată durata tratamentului nu au fost efectuate intervenții chirurgicale de către personalul medical; de asemenea, nicio arsură nu s-a infectat.

Schimbarea pansamentelor realizate cu BIOTITUS® Derma s-a realizat cu durere minimă (1,05 pe scara vizuală Wong-Baker), fără a traumatiza plaga și fără să afecteze țesuturile nou-formate.

Vindecarea arsurilor tratate cu comprese impregnate BIOTITUS® Derma și/sau cu unguent BIOTITUS® Derma din tub aplicator, s-a finalizat printr-un epiteliu de calitate superioară, cu foarte bune rezultate în ceea ce privește aspectul estetic, fără a dezvolta cicatrici hipertrofice – aspect deosebit de important în cazul pacienților arii cu plăgi localizate în zona feței sau toracică, în special în cazul pacienților de sex feminin.

Aspectul estetic are un impact deosebit asupra câștigului vieții pacienților, aceștia reușind să se integreze în societate fără niciun impediment.

Produsele BIOTITUS® Derma reduc cu oca 30% timpul de vindecare a arsurilor, prin stimularea granulației și epitelizării, favorizând formarea unui antilav la nivel natural, etabil.



100% NATURAL
100% ROMÂNESC



Eficiența dovedită clinic* în tratamentul
PLAGILOR ACUTE, CRONICE, DEHISCENTE,
AFECȚIUNILOR DERMATOLOGICE



Produse pe bază de ingrediente naturale
Dispozitive medicale clasa II b, în conformitate cu Directiva 93/42/EEC

*Studiu clinic pe 49 de pacienți desfășurat în perioada ianuarie – septembrie 2012, conform SR EN ISO 14155

Distribuit de DISPOMEDFARM — www.dispomedfarm.ro — office@dispomedfarm.ro
tel: 0342.220.200 — fax: 0342.220.201 — mobil: 0737.245.510 / 0747.136.546

Jurmed - Jurnal de Sanatate

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Rezultate estetice deosebit de favorabile în **tratamentul arsurilor**

Vindecarea plăgilor este un proces complex, care are ca rezultat restaurarea continuității anatomice și a funcției, într-un mod exact și ordonat. O plagă vindecă în mod ideal este acea plagă care s-a întors la structura anatomică, funcția și aspectul normal, fără să existe nici dovadă de țesut de cicatrizare.

Cicatrizarea plăgilor, mai ales cele de la nivelul feței, poate avea și implicații patologice; persoanele cu cicatrici pot deveni deprimante, deoarece sunt marginalizate.

Arsurile au cel mai mare impact asupra calității vieții; cicatricile pot cauza durere și disconfort. Spre exemplu, peste 50% dintre arsură implică zona capului și a gâtului, având drept cauze flacăra, lichidele fierbinți, substanțele chimice și curentul electric.



Vindecarea plăgilor arse tratate cu produsele BIOTITUS® derma (Compresă impregnată și/au tuburi cu unguent), s-a finalizat printr-un epiteliu de calitate superioară, cu foarte bune rezultate în ceea ce privește aspectul estetic, fără a se dezvoltă cicatrici hipertrofice. Pacienții au reușit să se reintegreze rapid în societate, fără niciun impediment de ordin estetic.

Proprietățile unguentului BIOTITUS® derma sunt datorate următoarelor ingrediente:

Uleiul de măsline

Conține glicerol, acid gras, steroli, vitamina A - cu efect pozitiv în regenerarea celulelor, stimulând refacerea țesuturilor afectate.

Uleiul de floarea-soarelui

Conține vitamina K și acid oleic, care asigură regenerarea celulelor pielii.

Uleiul de ricin

Conține acid linoleic, palmitic și oleic, de asemenea, cu rol în regenerarea celulelor pielii.

CATCLING

Pacient DM, 75 ani, de sex masculin, cu domiciliul rural, pensionar, s-a prezentat la unitatea spitalicească, prezentând arsură de gradul III, veche de aprox. 24 de ore, cauzată de flacăra, cu o suprafață de aprox. 250 cm², prezentând flicten.



Arsură a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguentul BIOTITUS® derma, inițial o dată la 2 zile, ulterior, o dată la 3 zile.

De remarcat faptul că îndepărtarea pansamentului aceluși cu BIOTITUS® derma, s-a realizat fără a traumatiza plaga arsă, datorită unguentului, acesta nefiind aderenț.

După 15 zile de tratament, arsură s-a vindecat în totalitate, cu rezultate estetice deosebit de pozitive.



Conf. Univ. Dr. Horia Părvănescu:
„Produsele BIOTITUS® derma reduc cu cca 30% timpul de vindecare a arsurilor, prin stimularea granulației și a epitelizării, favorizând formarea unui epitelii de bună calitate, stabil.
De asemenea, durerea resimțită de subiecți la schimbarea pansamentului aceluși cu produsele BIOTITUS® derma este diminuată semnificativ.”

BIOTITUS®
Derma



100% NATURAL
100% ROMÂNESC



EFICIENȚA DOVEDITĂ CLINIC* ÎN TRATAMENTUL
PLĂGILOR ACUTE, CRONICE, DEHISCENTE,
AFECȚIUNILOR DERMATOLOGICE

dmf

CE
1868

Produse pe bază de ingrediente naturale
Dispozitive medicale clasă II b, în conformitate cu Directiva 93/42/EEC

*Studiu clinic pe 49 de pacienți desfășurat în perioada ianuarie - septembrie 2012, conform SR EN ISO 14155

Distribuit de DISPOMEDFARM - www.dispomedfarm.ro - office@dispomedfarm.ro
tel: 0342.220.200 - fax: 0342.220.201 - mobil: 0737.245.510/0747.136.546

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA



SIGURE ȘI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

ARSURILOR

Arsurile reprezintă vătămări cauzate de căldura excesivă sau de anumite substanțe chimice care, pe lângă problemele deosebite pe care le pun din punct de vedere al tratamentului și al sechelelor, au un impact foarte mare asupra cheltuielilor din domeniul sănătății.

De notat că arsurile pot influența negativ calitatea vieții pacientului, chiar și după vindecare, mai ales cele localizate în zone de interes (față, torace), atât în cazul bărbaților, dar în special al femeilor, astfel încât aspectele legate de calitatea epitelizării au o importanță deosebită.

Prezente pe piața europeană, inclusiv pe piața românească de peste 4 ani, produsele **BIOTITUS® Derma**, și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul plăgilor cronice și al celor acute, inclusiv al arsurilor până la gradul III.



aspect inițial

după 14 zile de tratament



aspect inițial

după 12 zile de tratament



aspect inițial

după 5 zile de tratament



aspect inițial

după 7 zile de tratament

Prof.Univ.Dr. ION BORDEIANU:

“Un avantaj important al produselor **BIOTITUS®** Derma în tratamentul arsurilor, îl constituie epitelizarea rapidă, cu epiteliu de bună calitate și reducerea duratei medii de vindecare, inclusiv pentru leziunile intermediare și profunde...”



REPRODUCERE DE TINE

Distribuit de DISPOMEDFARM. www.dispomedfarm.ro. office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201. Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



Eficienta dovedita clinic
in tratamentul

ARSURILOR
si al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI TERAPEUTICE

- ↓ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ↓ elimina riscul de infectare;
- ↓ nu determina efecte adverse, cu exceptia pacientilor alergici la unul din ingrediente;
- ↓ indepartarea pansamentului fara durere;
- ↓ asigura o epitelizare de calitate superioara.



Unguentul **BIOTITUS®** Derma are in compozitie extracte naturale din plante si excipienti:

- *olivae oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hidrogenate*,
- *bismuthi subgallas*,

compoziție care este brevetată internațional.

Eficienta produselor **BIOTITUS®** Derma este dovedita clinic.

Distribuit de DISPOMEDFARM.

www.dispomedfarm.ro.

office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax:

0342.220.201. Mobil:

0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA

SIGURE SI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

ULCERATIILOR

Ulceratiile de gamba venoase. Orice afectiune a mușchiului gambei sau a valvelor venoase afectează sănătatea gambei, din cauza faptului că fluxul sanguin devine necorespunzător.

Eventual, integritatea tesuturilor este afectată și leziunile cutanate apar, din cauza traumelor minime și, uneori, fara nici o trauma.

aspect initial dupa doua luni de tratament

aspect initial dupa 23 zile de tratament

Printre complicatiile diabetului, **sindromul piciorului diabetic** (Diabetic Foot Syndrome), este cel mai frecvent. Conform sondajelor epidemiologice, aproximativ 15% din pacienti cu diabet mellitus sufera de leziuni ale piciorului, cu diferite severitati, adesea soldandu-se cu amputare.

Prezente pe piata europeana, inclusiv pe piata romaneasca de peste 4 ani, produsele **BIOTITUS® Derma**, și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul plăgilor cronice și al celor acute, inclusiv al ulceratiilor gambei și a celor diabetice grave.

aspect initial dupa tratament

Conf. Dr. HORIA PARVANESCU:

"Faptul ca dupa 6 zile de tratament cu **BIOTITUS® Derma** volumul mediu al ulceratiilor s-a redus la jumatate fata de cel initial, iar dupa 56 zile s-a redus cu 98%, iar suprafata medie a ulceratiilor s-a redus cu 85% dupa 56 zile de tratament, demonstreaza performantele produselor in tratamentul acestor tipuri de plagi cronice..."

Eficienta dovedita clinic in

tratatamentul

ULCERATIILOR

si al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI TERAPEUTICE

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse, cu exceptia pacientilor alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ indepartarea pansamentului fara durere;
- ⇒ asigura o epitelizare de calitate superioara.

Unguentul **BIOTITUS® Derma** are in compozitie extracte naturale din plante si excipienti:

- *olivae oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hidrogenate*,
- *bismuthi subgallas*,

compoziție care este brevetată internațional.

Eficiența produselor **BIOTITUS® Derma** este dovedită clinic.

Distribuit de DISPOMEDFARM. www.dispomedfarm.ro. office@dispomedfarm.ro.
Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201. Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546

Distribuit de DISPOMEDFARM.
www.dispomedfarm.ro.
office@dispomedfarm.ro.
Tel.: 0342.220.200. Fax:
0342.220.201. Mobil:
0737.245.510; 0747.136.546

MEIEU ALĂTURI DE TINE!

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA

BIOTITUS® Derma **SIGURE SI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL**
ULCERELOR DE PRESIUNE
(ESCARELOR)

Ulcerele de presiune (escarele) reprezintă o afectare localizată a pielii și/sau tesuturilor subcutanate, în mod uzual în jurul proeminenței oaselor, ca rezultat al presiunii sau a presiunii combinate cu transpirația și/sau fricțiunea. Persoanele cu mobilitatea afectată sunt cele mai vulnerabile la ulcerule de presiune. Alți factori care predispon la dezvoltarea ulcerului de presiune sunt nutriția necorespunzătoare, afectarea senzațiilor, incontinența și afectarea stărilor fizice și mentale ale pacientului. Ulcerele de presiune se vindecă extrem de greu; odată ce au apărut, aceste tipuri de plăgi cronice sunt foarte rezistente la terapiile medicale cunoscute. Prezența pe piața europeană, inclusiv pe piața românească de peste 4 ani, produsele **BIOTITUS® Derma**, și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul plăgilor acute și al celor cronice, inclusiv al ulcerelor de presiune (escarelor) grave.




aspect initial **dupa trei luni de tratament**

Prof. Univ. Dr. ION BORDEIANU:

“Deosebit de important este modul de acțiune a unguentului **BIOTITUS® Derma** care stimulează rezervele de celule epiteliale, fapt dovedit prin reducerea accelerată a profunzimii escarelor. În medie, cu 20 de zile înainte de vindecare, escarele au devenit superficiale, nemaiprezentând profunzime...”

DMF Distribuitor de DISPOMEDFARM, www.dispomedfarm.ro, office@dispomedfarm.ro
Tel.: 0342.220.200, Fax: 0342.220.201, Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546

BIOTITUS® Derma **EFICIENȚA DOVEDITĂ CLINIC ÎN**
TRATAMENTUL
ESCARELOR
și al altor leziuni ale pielii

PROPRIETĂȚI TERAPEUTICE

- scurtează timpul necesar vindecării;
- elimină riscul de infecție;
- nu determină efecte adverse, cu excepția pacienților alergici la unul din ingrediente;
- îndepărtarea pansamentului fără durere;
- asigură o epitelizare de calitate superioară.



Unguentul **BIOTITUS® Derma** are în compoziție extracte naturale din plante și excipienți:

- *oliveae oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hidrogenate*,
- *bismuthi subgallas*,

compoziție care este brevetată internațional.

EFICIENȚA produselor **BIOTITUS® Derma** este dovedită clinic.

DMF Distribuitor de DISPOMEDFARM, www.dispomedfarm.ro, office@dispomedfarm.ro
Tel.: 0342.220.200, Fax: 0342.220.201, Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546

Publicație destinată publicului larg, martie 2015

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA



SIGURE SI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

ULCERULUI DE GAMBĂ VENOS

Ulceratiile cronice ale membrilor inferioare sunt afectiuni frecvente la persoanele de peste 65 de ani, cu o incidență de 3-5%.

Incidența acestor tipuri de ulceratii este în creștere ca urmare a îmbătrânirii populației și a factorilor de risc, cum ar fi: fumatul, obezitatea și diabetul.

Cauza principală o reprezintă insuficiența venoasă cronică, manifestarea cutanată constând în una sau mai multe plăgi profunde, care au o tendință lentă spre vindecare.



Alte cauze ale ulceratiilor gambei sunt reprezentate de infectii, vasculite, boli maligne ale pielii, etc.

Prezente pe piata europeana, inclusiv pe piata romaneasca, de peste 5 ani, produsele Biotitus® Derma și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul plăgilor acute și al celor cronice, inclusiv al ulceratiilor de gambă venoase.

Managementul eficient al exudatului în timpul tratamentului a determinat îndepărtarea secrețiilor în exces prin absorbție și prin menținerea unui echilibru hidric optim, ceea ce a asigurat și o debridare optimă a ulceratiilor (îndepărtarea țesuturilor necrozate și/sau fibrinoase).

Conf. Univ. Dr. Horia Părvănescu

"Vindecarea ulceratiilor de gambă tratate cu produsele Biotitus® Derma a decurs fără evenimente grave sau efecte adverse, starea pielii perilezionale fiind foarte bună. După 56 de zile de tratament, suprafața ulceratiilor reprezenta 15% din cea inițială, ceea ce demonstrează eficacitatea deosebită a produselor Biotitus® Derma în tratamentul ulceratiilor venoase"



Distribuit de DISPOMEDFARM, www.dispomedfarm.ro, office@dispomedfarm.ro

Tel.: 0342.220.200, Fax: 0342.220.201, Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



Eficienta dovedita clinic în
tratamentul

ULCERULUI DE GAMBĂ
VENOS
și al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI TERAPEUTICE

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse, cu exceptia pacientilor alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ indepartarea pansamentului fara durere;
- ⇒ asigura o epitelizare de calitate superioara.



Unguentul Biotitus® Derma are în compozitie extracte naturale din plante și excipienti:

- olivae oleum,
- helianthi oleum,
- cera, camphora,
- gum rosin,
- ricini oleum hydrogenate,
- bismuthi subgallas,

compozitie care este brevetată internațional.

Eficienta produselor Biotitus® Derma este dovedita clinic.

Distribuit de DISPOMEDFARM.

www.dispomedfarm.ro.

office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax:

0342.220.201. Mobil:

0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE !

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA



SIGURE ȘI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

ZONEI DONATOARE DE GREFĂ CUTANATĂ

Grefa de piele este folosită pentru plăgi extinse, la care este dificilă suturarea sau pentru plăgile care determină cicatrici proeminente care ar putea cauza probleme fizice sau psihologice pentru pacient. Grefarea presupune crearea unei alte plăgi, în zona donatoare, căreia, de asemenea, trebuie să i se acorde atenția cuvenită.

Pentru a reduce la minim disconfortul pentru pacient, este esențial să se utilizeze un pansament adecvat; îndepărtarea de pe plagă a unui pansament necorespunzător poate provoca o mare durere și chiar poate întârzia vindecarea acestor tipuri de plăgi (European Wound Management Association – EWMA, 2002)



Vindecarea zonei donatoare de grefă cutanată poate fi împărțită în două faze:


- Faza "umedă" când sunt produse cantități mari de exudat, caz în care pansamentul trebuie să permită și absorbția acestuia;
- Faza "uscată" când nivelul exudatului scade foarte mult și patul plăgii devine uscat, caz în care pansamentul trebuie să fie non-adherent.

Prezente pe piața europeană, inclusiv pe piața românească, de peste 5 ani, produsele **BIOTITUS® Derma** și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul zonei donatoare de grefă cutanată.

Managementul eficient al exudatului în timpul tratamentului a determinat îndepărtarea secrețiilor în exces prin absorbție și prin menținerea unui echilibru hidric optim, ceea ce a asigurat și o îndepărtare atraumatică a pansamentului.



Aspect inițial

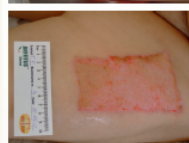

După 5 zile

Conf. Univ. Dr. Horia Părvănescu

"Vindecarea zonelor donatoare de grefă cutanată tratate cu produsele **BIOTITUS® Derma** a decurs fără evenimente grave sau efecte adverse, starea pielii peri-lesionale fiind foarte bună."



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Distribuit de DISPOMEDFARM, www.dispomedfarm.ro, office@dispomedfarm.ro

Tel.: 0342.220.200, Fax: 0342.220.201, Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



Eficiența dovedită clinic în
tratamentul

ZONEI DONATOARE DE
GREFĂ CUTANATĂ
și al altor leziuni ale pielii

PROPRIETĂȚI TERAPEUTICE

- ⇒ scurtează timpul necesar vindecării;
- ⇒ elimină riscul de infectare;
- ⇒ nu determină efecte adverse, cu excepția pacienților alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ îndepărtarea pansamentului fără durere;
- ⇒ asigură o epitelizare de calitate superioară.



Unguentul **BIOTITUS® Derma** are în compoziție extracte naturale din plante și excipienți:

- *oliveae oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hydrogenate*,
- *bismuthi subgallat*,

compoziție care este brevetată internațional.

Eficiența produselor **BIOTITUS® Derma** este dovedită clinic.

Distribuit de DISPOMEDFARM.

www.dispomedfarm.ro.

office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax:

0342.220.201. Mobil:

0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA




SIGURE SI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

PICIORULUI DIABETIC

Aproximativ 15% din diabetici dezvoltă o ulcerăție și mai mult de unul din zece cazuri au drept consecință amputarea piciorului. Piciorul diabetic poate fi clasificat în: picior neuropatic și picior neuroischemic.

Neuropatia reprezintă deteriorarea funcției nervului; 20-40% dintre diabetici, prezentând neuropatie. Neuropatia poate fi: motorie (deteriorarea funcției nervilor care controlează mușchii), autonomă (se poate întinde până la genunchi, cauzând transpirația pielii și apariția fisurilor) și senzorială (face pacientul insensibil la traume mecanice, chimice și termice).

Neuroischemia este cauzată de ateroscleroza arterelor picioarelor (piciorul poate prezenta o piele subțire, strălucitoare sau poate cauza atrofierea țesuturilor subcutanate).

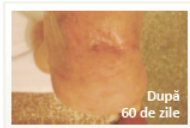

Este recunoscut faptul că în jur de jumătate dintre ulcerățiile diabetice, la picioare și amputațiile suferite de persoanele cu diabet, pot fi prevenite printr-o îngrijire optimă, inclusiv îngrijirea plăgilor asociate.

Prof. Univ. Dr. Ioan Petre Florescu:
"Vindecarea ulcerățiilor diabetice tratate cu produsele **BIOTITUS® Derma** a decurs fără evenimente grave sau efecte adverse, plăgile evoluând favorabil, spre vindecare."



Distribuit de DISPOMEDFARM. www.dispomedfarm.ro. office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201. Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



Efficienta dovedita clinic in
tratamentul

PICIORULUI DIABETIC
si al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI TERAPEUTICE

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse, cu exceptia pacientilor alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ indepartarea pansamentului fara durere;
- ⇒ asigura o epitelizare de calitate superioara.



Unguentul **BIOTITUS® Derma** are in compozitie extracte naturale din plante si excipienti:

- *olivae oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hydrogenate*,
- *bismuthi subgallas*,

compoziție care este brevetată internațional.

Efficienta produselor **BIOTITUS® Derma** este dovedita clinic.

Distribuit de DISPOMEDFARM.

www.dispomedfarm.ro.

office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax:

0342.220.201. Mobil:

0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA



SIGURE SI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

DERMATITELOR DE CONTACT

Dermatitele de contact sunt inflamații ale tegumentului cauzate de contactul cu o substanță iritantă. Nu sunt contagioase și nici nu au potențial malign. Tegumentul este afectat în special la nivelul mâinilor, tălpilor și al regiunii inghinale. Dermatitele de contact pot afecta ambele sexe, toate vârstele, dar sunt mai des întâlnite la femei decât la bărbați.

Majoritatea reacțiilor cutanate după contactul cu anumite substanțe chimice sunt iritative, numai aproximativ 20% sunt de natură alergică. Dermatitele de contact se instalează la mai multe zile, săptămâni sau luni de contact cu substanța respectivă. Pielea devine mai roșie (eritematoasă), frecvent apar vezicule, iar pruritul este constant.



Istoricul bolii și aspectul erupțiilor cutanate orientează medicul și pacientul spre diagnosticul de posibilă dermatită de contact. Localizarea dermatitei este deseori sugestivă pentru contactul cu un anumit alergen.

De exemplu, dermatita localizată la picioare poate fi cauzată de materialele din care este confecționată încălțăminte, cea de la încheietura mâinii, lobul urechii sau de la gât, de contactul cu bijuterii.



Dermatita feței este frecvent cauzată de cosmetice, șampon, lac de par și vopsea de păr. Dermatita de contact a pleoapelor poate fi cauzată de fard, tus, rimel.

Prezente pe piața europeană, inclusiv pe piața românească, de peste 5 ani, produsele BIOTITUS® Derma și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul local al dermatitelor de contact.

Managementul eficient al exudatului în timpul tratamentului a determinat îndepărtarea secrețiilor în exces prin absorbție și prin menținerea unui echilibru hidric optim, ceea ce a asigurat și o îndepărtare atraumatică a pansamentului.

Unguentul BIOTITUS® Derma este emolient, are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, aplicându-se într-un strat de 1-2 mm pe zona afectată.

Conf. Dr. Cristodur Patricia
"Unguentul BIOTITUS® Derma a fost deosebit de eficient în cazul dermatitelor rebele la tratament."



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Distribuit de DISPOMEDFARM. www.dispomedfarm.ro. office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201. Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



Eficienta dovedita clinic in
tratamentul

DERMATITEI DE CONTACT
si al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI TERAPEUTICE

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse, cu exceptia pacientilor alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ indepartarea pansamentului fara durere;
- ⇒ asigura o epitelizare de calitate superioara.



Unguentul BIOTITUS® Derma are in compozitie extracte naturale din plante si excipienti:

- *olive oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hidrogenate*,
- *bismuthi subgallas*,

compoziție care este brevetată internațional.

Eficienta produselor BIOTITUS® Derma este dovedita clinic.

Distribuit de DISPOMEDFARM.

www.dispomedfarm.ro.

office@dispomedfarm.ro.

Tel.: 0342.220.200. Fax:

0342.220.201. Mobil:

0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Jurmed - Jurnal de Sanatate

PRODUSELE DIN GAMA

SIGURE SI EFICIENTE ÎN TRATAMENTUL

ARSURILOR

Arsurile reprezintă o vătămare cauzată de căldura excesivă, în primul rând fiind afectată pielea, cauzând distrugerea țesuturilor și coagularea sângelui în zona afectată.

Arsurile sunt plăgi traumatiche (acute), care pot fi cauzate de expunerea la căldura termică, la substanțe chimice caustice, la electricitate, radiații etc.

Aspect inițial

Duăp 7 zile

Arsurile pot fi:

- Superficiale de grad I - pielea este intactă, dar prezintă semne de roșeață și este foarte dureroasă;
- Superficiale dermale de grad II - sunt asociate cu formarea bășicilor, roșeții și exudatului, fiind foarte dureroase. Se vindecă în 10 - 21 zile, dacă nu se infectează sau dacă plaga nu este afectată de alți factori mecanici. Pot apărea de culoare roșie în primele 6 săptămâni
- Dermale profunde de grad III - vindecarea durează mai mult de 30 zile, fiind insensibile, de culoare alb-gălbui.

Prezente pe piața europeană, inclusiv pe piața românească, de peste 5 ani, produsele **BIOTITUS® Derma** și-au demonstrat siguranța și eficacitatea în tratamentul arsurilor, inclusiv al celor de grad III.

Conf. Univ. Dr. Horia Părvănescu
"Vindecarea arsurilor tratate cu **BIOTITUS® Derma**, s-a finalizat printr-un epiteliu de calitate superioară, cu foarte bune rezultate în ceea ce privește aspectul estetic."

Distribuit de DISPOMEDFARM. www.dispomedfarm.ro. office@dispomedfarm.ro.
Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201. Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546

Efficienta dovedita clinic in

tratamentul

ARSURILOR

si al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI TERAPEUTICE

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse, cu exceptia pacientilor alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ indepartarea pansamentului fara durere;
- ⇒ asigura o epitelizare de calitate superioara.

Unguentul **BIOTITUS® Derma** are în compoziție extracte naturale din plante și excipienți:

- *oliveae oleum*,
- *helianthi oleum*,
- *cera, camphora*,
- *gum rosin*,
- *ricini oleum hidrogenate*,
- *bismuthi subgallas*,

compoziție care este brevetată internațional.

Efficienta produselor **BIOTITUS® Derma** este dovedita clinic.

Distribuite si prin farmaciile Catena si Sensiblu.

Distribuit de DISPOMEDFARM. www.dispomedfarm.ro.
office@dispomedfarm.ro.
Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201. Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546

Medical Market

Articole de specialitate

Articole de specialitate

Perspectivă noi în managementul plăgilor și al afecțiunilor dermatologice

Unguentul BIOTITUS® Derma este alcătuit din extracte naturale din plante și excipienți: olive oleum, helianthi oleum, cera, camphora, coloponium, ricini oleum hidrogenate, bismuthi subgallat, compoziție care este brevetată internațional.

Produsele BIOTITUS® Derma sunt dispozitive medicale clasa II b, purtătoare de marcaj european de conformitate CE; utilizarea acestora neantrenând nici un risc pentru pacient sau pentru medicii specialiști, fiind evaluate atât în ceea ce privește siguranța, cât și performanța.

Eficacitatea produselor BIOTITUS® Derma a fost demonstrată în cadrul mai multor spitale din țară, acestea fiind utilizate în tratarea:

- **Plăgilor Acute:** arsuri, plăgi chirurgicale, escoriații, alte plăgi traumatice ale pielii;
- **Plăgilor Cronice:** escare, ulcere varicoase, picior diabetic;
- **Afecțiuni dermatologice:** eczeme, dermatite, psorizis.

Produsele BIOTITUS® Derma sunt eficiente în toate fazele de vindecare a plăgilor: inflamatorie, de granulație și de epitelizare, datorită următoarelor proprietăți:

- Proprietăți antiinflamatorii;
- Debridare autolitică – este asigurată de Unguentul BIOTITUS® Derma prin folosirea împreună cu un pansament ocuziv;
- Previne și controlează infecția plăgii
- Bacteriostatic demonstrat pentru ger-

meni multirezistenți: Staphylococcus aureus, Streptococcus gr.A, Enterococcus, E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Providentia stuartii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa;

- Bactericid limitat pentru Staphylococcus aureus și Streptococcus pyogenes gr.A;
- Acțiune antifungică pentru Candida albicans, Aspergillus niger;
- Asigură mediul umed caracterizat de o hidratare constantă a plăgii, temperatură și pH;
- Asigură formarea unui nou epiteliu de calitate și favorizează regenerarea pielii;

Studii de caz

1. Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul arsurilor.

Produsele BIOTITUS® Derma sunt folosite în mod curent în secția de chirurgie plastică de la Spitalul Bagdasar-Arseni, rezultatele fiind deosebit de favorabile. Tratamentul s-a desfășurat sub îndrumarea D-lui. Prof. Dr. Florescu Ioan, în cadrul Spitalului Bagdasar-Arseni, pe o perioadă de 5 zile. Pacientului nu i s-a administrat



tratament medicamentos și nu au fost efectuate intervenții chirurgicale.

Fig. 1 – bărbat, 41 ani, cu arsură veche de 4 ore, produsă prin flăcără, localizată în zona mâinilor. A – aspect inițial; B – după 3 zile de tratament; C – după 5 zile de tratament.

Arsura a fost tratată prin aplicarea unui pansament alcătuit cu compresă impregnată BIOTITUS® Derma și unguent BIOTITUS® Derma, peste care au fost aplicate comprese sterile din tifon. Pansamentul astfel format a fost menținut pe plagă, în medie, 1,5 zile.

Pansamentul alcătuit cu produsele BIOTITUS® Derma a fost îndepărtat cu ușurință de pe arsură, fără a afecta țesuturile nou-formate (de granulație și de epitelizare).

Concluzii

Constatarea personalului medical din cadrul secției de Chirurgie plastică și reconstructivă a Spitalului Bagdasar-Arseni, în ceea ce privește tratamentul arsurilor cu produsele din gama BIOTITUS® Derma ne îndreptățește să afirmăm că acestea sunt deosebit de eficiente și sigure în utilizare. De asemenea, s-a remarcat calitatea epitelizării, rezultatele vindecării, din punct de vedere estetic fiind excepționale.

2. Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul zonei donatoare de grea cutanată.

Tratamentul în cazul zonei donatoare de grea cutanată a fost efectuat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cra-

iova, sub îndrumarea D-lui. Conf. Univ. Dr. Horia Părvanescu, și s-a desfășurat pe o perioadă de 5 zile. Pacientului nu i s-a administrat tratament medicamentos.

Pansamentul alcătuit cu unguent BIOTITUS® Derma a fost aplicat cu ușurință; de asemenea, pansamentul a fost îndepărtat cu ușurință, fără a afecta starea plăgii și țesuturile de granulație/epitelizare.

Fig. 2 – femeie, 45 ani, cu plagă chirurgicală, în urma recoltării de grea cutanată, localizată în zona piciorului drept. A – aspect inițial; B – după o zi de tratament; C – după 5 zile de tratament.

Plaga a fost tratată prin aplicarea unui pansament alcătuit cu unguent BIOTITUS® Derma, peste care au fost aplicate comprese sterile din tifon. Pansamentul astfel format a fost schimbat zilnic; îndepărtarea realizându-se fără durere.

Concluzii

Eficiența deosebită a produselor BIOTITUS® Derma, toleranța și acceptabilitatea din punctul de vedere al personalului medical (ușurința în utilizare), sunt calități care le recomandă pentru a fi folosite pe scară largă în tratamentul zonei donatoare de grea cutanată, eliminând riscul de infecție, inclusiv în cazurile în care se urmărește obținerea unor rezultate deosebite din punct de vedere estetic.

Petre Berechet Comănescu,
Director Marketing Dispomedfarm



Medical Market

Articole de specialitate

Perspective noi în managementul plăgilor și al afecțiunilor dermatologice **BIOTITUS® Derma**

Unguentul BIOTITUS® Derma este alcătuit din extracte naturale din plante și esențiale: olive oleum, helianthi oleum, cera, camphora, coloponium, ricini oleum hidrogenerat, bismuthi subgallat, compoziție care este brevetată internațional.

Produsele BIOTITUS® Derma sunt dispozitive medicale clasa II b, purtătoare de marcaj european de conformitate CE; utilizarea acestora neantrenând nici un risc pentru pacient sau pentru medicii specialiști, fiind evaluate atât în ceea ce privește siguranța, cât și performanța.

Eficacitatea produselor BIOTITUS® Derma a fost demonstrată în cadrul mai multor spitale din țară, acestea fiind utilizate în tratarea:

- Plăgilor Acute: arsuri, plăgi chirurgicale, escoriații, alte plăgi traumatice ale pielii;
- Plăgilor Cronice: escare, ulcere varicoase, picior diabetic;
- Afecțiuni dermatologice: eczeme, dermatite, psoriazis.

Produsele BIOTITUS® Derma sunt eficiente în toate fazele de vindecare a plăgilor: inflamatorie, de granulație și de epitelizare.

Studii de caz

1. Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul ulcerelor venoase
Produsele BIOTITUS® Derma sunt folosite în mod curent în secția de chirurgie plastică a Spitalului Județean de Urgență Constanța, rezultatele fiind deosebit de favorabile. Cazul de mai jos reprezintă o plagă traumatică suprapusă unui ulcer vascular.

Fig. 1 – bărbat, 66 ani, cu plagă traumatică suprapusă unui ulcer vascular, vechime 2 zile. A – aspect inițial; B – după 175 zile de tratament; C – după 293 zile.

Plaga a fost tratată prin aplicarea unui pansament cu unguent BIOTITUS® Derma, peste care au fost aplicate comprese impregnate BIOTITUS® Derma. Pansamentul astfel format a fost menținut pe plagă, în medie, 2 zile.

Pansamentul alcătuit cu produsele BIOTITUS® Derma a fost îndepărtat cu ușurință de pe plagă, fără a afecta țesuturile nou-formate (de granulație și de epitelizare).

2. Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul escarelor.

Tratamentul în cazul mai jos prezentat a fost efectuat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța, și s-a desfășurat pe o perioadă de 100 zile, pacientului nu i s-a administrat tratament medicamentos.

Pansamentul alcătuit cu unguent BIOTITUS® Derma a fost aplicat cu ușurință;

de asemenea, pansamentul a fost îndepărtat cu ușurință, fără a afecta starea plăgii și țesuturile de granulație/epitelizare.

Fig. 2 – femeie, 44 ani, prezintă o escară localizată în zona sacrală. A – aspect inițial; B – ziua 66 de tratament; C – după 100 zile de tratament.

Plaga a fost tratată prin aplicarea unui pansament alcătuit cu unguent BIOTITUS® Derma, peste care au fost aplicate comprese sterile din tifon. Pansamentul astfel format a fost menținut pe plagă în medie 1.8 zile; îndepărtarea realizându-se fără durere.



Articole de specialitate

Beneficii:

- Scurtează timpul de vindecare a plăgii cu până la 30%.
- Previne infectarea plăgii, în special a celor localizate în zone de risc.
- Epitelizare de calitate, fapt cu o importanță vitală în cazul pacienților cu arsuri localizate la nivelul feței sau toracelui.
- Confort deosebit pentru pacient prin ameliorarea senzației de durere, ceea ce permite mobilizarea precoce.
- Nu este aderent la plagă, se îndepărtează ușor și atraumatic.
- Ușor de aplicat în cazul plăgilor în zone dificile (ex: pliuri anatomice, joncțiuni cutaneo-mucoase, etc.)
- Nu sunt necesare precauții suplimentare, cu excepția alergiei la una din componentele unguentului BIOTITUS® Derma.
- Costul total al tratamentului per pacient, poate fi redus cu până la 30%, prin scăderea costurilor directe și indirecte.

Concluziile Raportului de Investigatie Clinică

„Utilizarea Biotitus® Derma Compressa Impregnata si tub cu unguent Biotitus® Derma în tratamentul arsurilor, escarelor, ulcerului de gamba si al piciorului diabetic”

„Analizând datele obținute în investigația clinică de față, se constată faptul că produsele din gama BIOTITUS® Derma [compresa impregnata si unguent], sunt sigure în utilizare, atât din punct de vedere al siguranței, cât și din punct de vedere al eficacității. Nu au fost semnificate evenimente adverse grave, care să aibă efecte nedorite, astfel încât să fie necesară întreruperea tratamentului plăgilor [acute și cronice] cu produsele BIOTITUS® Derma, sau să impună adoptarea altei metode de tratament [tratament medicamentos sau chirurgical].

Apreciem că produsele BIOTITUS® Derma [compresa impregnata si unguent] sunt sigure în utilizare, putând fi folosite cu succes în tratamentul plăgilor acute și cronice.

În ceea ce privește performanța produselor BIOTITUS® Derma, un avantaj important al acestor produse, în cazul arsurilor, îl constituie epitelizarea rapidă, cu epitelu de bună calitate și reducerea duratei medii de vindecare, inclusiv pentru leziunile intermediare și profunde. Totodată, se constată diminuarea durerii resimțite de pacient, precum și eliminarea riscului de supraînclăzire a plăgii.

În cazul arsurilor de gradul III, unguentul BIOTITUS® Derma stimulează granulația și epitelizarea.

BIOTITUS® Derma este un unguent cu rezultate bune și foarte bune în tratamentul arsurilor de gradul III și IIb unde produce epitelizare. Este de folos și în arsurile de gradul III, unde ajută la obținerea unei granulații de calitate într-un timp mai scurt în vederea grefării cu piele.

În cazul plăgilor cronice: escare, ulcer de gamba și plaga diabetică, se constată, de asemenea, stimularea granulației și a epitelizării, prin stimularea rezervelor de celule epiteliale. Acest lucru este demonstrat de faptul că, plăgile cronice acoperite cu pansament alcătuit cu produsele BIOTITUS® Derma [compresa impregnata si unguent], inițial, își reduc profunzimea [implicit, volumul], devenind plăgi superficiale, apoi, vindecarea concretizându-se printr-o reducere accentuată a suprafeței [epitelizare], de la marginea plăgii, spre interior.

Totodată, este remarcabilă acțiunea de debridare autolitică a unguentului BIOTITUS® Derma, proporția țesuturilor necrotice și fibrinoase din plăgile cronice, reducându-se de la o schimbare a pansamentului la

alta. De menționat faptul că debridarea este nechenuroasă și durabilă [odată îndepărtate aceste țesuturi, nu mai reapar].

Este cunoscut faptul că plăgile cronice necesită un timp îndelungat pentru vindecare; unele dintre acestea nu se vindecă [mai ales dacă luăm în calcul și existența patologiilor asociate], fiind necesară intervenția chirurgicală, până la amputare [în cazul piciorului diabetic].

Faptul că, sub pansamentul alcătuit cu produsele BIOTITUS® Derma [compresa impregnata si/sau unguent], toate cele 6 escare monitorizate, au avut o evoluție deosebit de pozitivă, spre vindecare, a dintre acestea vindecându-se complet [o escară s-a vindecat în 7 zile de tratament, a doua în 18 zile, a treia în 33 zile, a patra în 61 zile], relevă performanțele deosebite ale produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul escarelor.

Deosebit de important este modul de acțiune a unguentului BIOTITUS® Derma, care stimulează rezervele de celule epiteliale, fapt dovedit prin reducerea accelerată a profunzimii escarelor [implicit, a volumului]. În medie, cu 20 de zile înainte de vindecare, escarele au devenit superficiale, nemaisprezentând profunzimea.

În cazul ulcerărilor de gamba și diabetice tratate cu BIOTITUS® Derma, faptul că după 6 zile de tratament cu BIOTITUS® Derma, volumul mediu al acestor plăgi s-a redus la jumătate din cel inițial, iar după 56 zile, s-a redus cu 98%, iar suprafața medie s-a redus la jumătate din cea inițială, după 30 de zile de tratament, iar după 56 zile, aceasta reprezintă 15% din cea inițială, demonstrează performanțele produselor BIOTITUS® Derma în tratamentul acestor tipuri de plăgi cronice.

De asemenea, o ulcerăție s-a vindecat după 17 zile de tratament, alta după 22 zile, a treia după 31 de zile, a patra ulcerăție, după 64 zile de tratament.

Raportându-ne la perioada de tratament în care au fost monitorizate datele, conform prezentei investigații clinice, faptul că toate escarele au evoluat spre vindecare, dar și faptul că 4 ulcerății din cele 13 monitorizate s-au vindecat, demonstrează, raportat la datele din literatura actuală, relevanța deosebită a datelor culese din prezenta investigație clinică. Prof. Univ. Dr. Ion Bordeianu.

Berechet Comănescu Petre
Director Marketing Dispomedfarm



Medical Market

Articole de specialitate

Perspective noi în managementul plăgilor și al afecțiunilor dermatologice **BIOTITUS® Derma**

Unguentul **BIOTITUS® Derma** este alcătuit din extracte naturale din plante și excipienți: olivele, ceră, camphora, coloponium, ricini oleum hidrogenate, bismuthi subgalas, compoziție care este brevetată internațional.

Produsele **BIOTITUS® Derma** sunt dispozitive medicale clasa II b, purtătoare de marcaj european de conformitate CE; utilizarea acestora neantrenând nici un risc pentru pacient sau pentru medicii specialiști, fiind evaluate atât în ceea ce privește siguranța, cât și performanța.

Eficacitatea produselor **BIOTITUS® Derma** a fost demonstrată în cadrul mai multor spitale din țară, acestea fiind utilizate în traterea:

- ▶ Plăgilor Acute: arsuri, plăgi chirurgicale, escoriații, alte plăgi traumatice ale pielii;
- ▶ Plăgilor Cronice: escare, ulcere varicoase, picior diabetic;
- ▶ Afecțiuni dermatologice: eczeme, dermatite, psoriasis;
- ▶ Produsele **BIOTITUS® Derma** sunt eficiente în toate fazele de vindecare a plăgilor: inflamatorie, de granulație și de epitelizare, datorită următoarelor proprietăți:
 - ▶ Proprietăți antiinflamatorii;
 - ▶ Debridare autolitică – este asigurată de Unguentul **BIOTITUS® Derma** prin folosirea împreună cu un pansament ocluziv;
 - ▶ Previne și controlează infecția plăgii
 - ▶ Bacteriostatic demonstrat pentru ger-



Pacient T.E., 26 ani, de sex masculin, cu domiciliul urban, cu o plagă aferentă zonei donatoare de grefă cutanată, localizată pe coapsa dreaptă.



S.M., sex feminin, 32 ani. Acnee Rozacee



Articole de specialitate

Concluziile Raportului de Investigatie Clinica „Utilizarea **BIOTITUS® Derma** Compresa Impregnata si tub cu unguent **BIOTITUS® Derma** în tratamentul arsurilor, escarelor, ulcerului de gamba si al piciorului diabetic”

„Analizand datele obtinute în investigatia clinica de fata, se constata faptul ca, produsele din gama **BIOTITUS® Derma** [compresa impregnata si unguent], sunt sigure în utilizare, atat pentru pacient, cat si pentru utilizator. Nu au fost semnalate evenimente adverse grave, care sa aiba efecte nedorite, astfel incat sa fie necesara intreruperea tratamentului plăgilor (acute si cronice) cu produsele **BIOTITUS® Derma**, sau sa impuna adoptarea altei metode de terapie [tratament medicamentos sau chirurgical]. Apreciam ca produsele **BIOTITUS® Derma**

[compresa impregnata si unguent] sunt sigure în utilizare, putand fi folosite cu succes în tratamentul plăgilor acute si cronice. În ceea ce priveste performanta produselor **BIOTITUS® Derma**, un avantaj important al acestor produse, în cazul arsurilor, îl constituie epitelizarea rapida, cu epitelii de bună calitate și reducerea duratei medii de vindecare, inclusiv pentru leziunile intermediare și profunde. Totodată, se constată diminuarea durerii resimțite de pacient, precum și eliminarea riscului de suprainfectare a plăgii. Totodată, este remarcabilă

actiunea de debridare autolítica a unguentului **BIOTITUS® Derma**, proportia tesuturilor necrozate și fibrinoase din plăgile cronice, reducându-se de la o schimbare a pansamentului la alta. De mentionat faptul ca debridarea este nedureroasa și durabilă [odată îndepărtate aceste tesuturi, nu mai reapar]. Deosebit de important este modul de acțiune a unguentului **BIOTITUS® Derma**, care stimulează rezervele de celule epiteliale, fapt dovedit prin reducerea accelerată a profunzimii escarelor [implicat, a volumului]. În medie, cu 20 de zile înainte de vindecare, escarele au devenit superficiale, ne mai prezentând profunzime. - Prof. Univ. Dr. Ion Bordeleanu

Beneficii:

- Scurteaza timpul de vindecare a plăgii cu pana la 30%.
- Previne infectarea plăgii, în special a acelor localizate în zone de risc.
- Epitelizare de calitate, fapt cu o importanță vitală în cazul pacienților cu arsuri localizate la nivelul feței sau toracului.
- Confort deosebit pentru pacient prin ameliorarea senzației de durere, ceea ce permite mobilitatea precoce.
- Nu este aderent la plăgi, se îndepărtează ușor și automat.
- Ușor de aplicat în cazul plăgilor în zone dificile (ex. plaiuri anatomice, juncțiuni cutaneo-mucoase, etc.)
- Nu sunt necesare proceduri suplimentare, cu excepția așezării la ună din componentele unguentului **BIOTITUS® Derma**.
- Costul total al tratamentului per pacient, poate fi redus cu până la 30%, prin scăderea costurilor directe și indirecte.

menii multirezistenți: Staphylococcus aureus, Streptococcus gr.A, Enterococcus, E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Providentia stuartii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa;

- ▶ Bactericid limitat pentru Staphylococcus aureus și Streptococcus pyogenes gr.A.
- ▶ Acțiune antifungică pentru Candida albicans, Aspergillus niger;
- ▶ Asigură mediul umed caracterizat de o hidratare constantă a plăgii, temperatură și pH;
- ▶ Asigură formarea unui nou epitelii de calitate și favorizează regenerarea pielii;

Petre Berechet Comanescu
Director Marketing DispoMedfarm

MF Ziarul Medicului de Familie



Păgile cronice sunt asociate în general, cu procesul de îmbătrânire a populației, exemple tipice fiind: ulcerele de presiune (escarele), ulcerul de gambă și ulcerul diabetic (patul diabetic).

TRATAMENTUL ULCELOR DE PRESIUNE (ESCARILOR) CU BIOTITUS® Derma

Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma (Compresii împănate și/au tuburi cu unguent), în tratamentul escarelor (în mediul spitalicesc sau ambulatoriu), au favorizat vindecarea acestora, după cum urmează:

Volumele plăgilor:

După 15 zile de tratament, volumul plăgilor s-a redus la jumătate;
După 45 zile de tratament, volumul s-a redus cu 90%;
După 89 zile de tratament, escarele au devenit superficiale (fără profunzime).

Suprafețele plăgilor:

După 15 zile de tratament, suprafețele plăgilor s-au redus la jumătate;
După 59 zile de tratament, suprafețele s-au redus cu 90%;
După 100 zile de tratament, toate escarele evaluate, s-au vindecat.

Caz clinic escare

Pacienta CC, 45 ani, de sex feminin, cu domiciliul urban, pensionară, diagnosticată cu ulcerul multiplă, fiind paraplegică, a fost admisă în unitatea spitalicească, prezentând o escară veche de 60 de zile, cauzată de imobilitate, situată în zona sacrală, cu unghii pețuș necrotice.
Inițial, escara prezenta o profunzime maximă de aprox. 3 cm și o suprafață de 160 cm².



Plaga a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguentul BIOTITUS® Derma. Inițial clinic, ulterior, o dată la 2 zile.
După 65 zile de tratament, escara nu a mai prezentat profunzime, devenind superficială.



După 100 zile de tratament, escara s-a vindecat.



EFICIENȚĂ, SIGURANȚĂ ȘI CONFORT ÎN TRATAMENTUL PLĂGILOR CRONICE



TRATAMENTUL ULCELOR DE VINDECARE DE GAMBĂ ȘI AL PATULUI DIABETIC CU BIOTITUS® Derma

Produsele BIOTITUS® Derma și-au dovedit eficiența în tratamentul acestor tipuri de plăgi, după cum urmează:

Volumele ulcerelor:

După 6 zile de tratament, volumul plăgilor s-a redus la jumătate;
După 56 zile de tratament, volumul s-a redus cu 90%.

Suprafețele ulcerelor:

După 30 zile de tratament, suprafețele plăgilor s-au redus la jumătate;
După 56 zile de tratament, suprafețele s-au redus cu 85%.

Caz clinic ulcer de gambă

Pacientul MP, 66 ani, de sex masculin, cu domiciliul urban, pensionar, diagnosticat cu insuficiență cardiacă, HTA, cardiopatie ischemică, insuficiență venoasă periferică, s-a prezentat la unitatea spitalicească cu defect genital post-traumatic, vechi de 2 de zile, la gamba dreaptă, cu țesut necrotic.
Inițial, ulcerul a prezentat o profunzime maximă de aprox. 2,5 cm și o suprafață de 180 cm².



Ulcerul a fost curățat cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguentul BIOTITUS® Derma. Inițial clinic, ulterior, o dată la 2 zile.
După 30 zile de tratament, ulcerul nu a mai prezentat profunzime, devenind superficială.



După 175 zile de tratament, suprafețele ulcerului s-au redus cu 92%, escara evoluând în continuare spre vindecare.



Caz clinic picior diabetic

Pacienta VI, 53 ani, de sex feminin, cu domiciliul urban, pensionară, diagnosticată cu diabet, s-a prezentat la unitatea spitalicească cu o ulceră, veche de aprox. 45 de zile, la piciorul stâng, cu țesut necrotic.

Inițial, ulcerul a prezentat o profunzime maximă de aprox. 1,5 cm și o suprafață de 40 cm².



Ulcerul a fost curățat cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguentul BIOTITUS® Derma. Inițial clinic, ulterior, o dată la 2 zile.

După 15 zile de tratament, țesutul necrotic a fost îndepărtat în totalitate.



După 60 zile de tratament, plaga s-a vindecat.



Precidem faptul că, pe toată durata tratamentului nu au fost efectuate intervenții chirurgicale de către personalul medical. Schimbarea pansamentelor realizate cu BIOTITUS® Derma s-a realizat cu durere minimă, fiind o traumă plăgii și fiind o efecte secundare non-fonante.

Distribuitor de produse medicale
www.abimedic.ro
office@abimedic.ro
Tel: 0361.236.500 Fax: 0361.236.501
Mobil: 0727.245.518, 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

Februarie 2015

MF Ziarul Medicului de Familie



Grefa de piele este folosită pentru plăgi extinse, la care este dificilă suturarea sau pentru plăgile care determină cicatrizări premehante care ar putea cauza probleme. Fibrele sau polimerice pentru pacient, dintr-o presopie creasta unei alte plăgi, în zona donatoare, dintr-o, de asemenea, trebuie să se acorde atenție corespunzătoare.

Pentru a reduce la minim disconfortul pentru pacient, este esențial să se utilizeze un pansament aderece; îndepărtarea de pe plăgi a unui pansament necorespunzător poate provoca o mare durere și chiar poate întârzi vindecarea acestor tipuri de plăgi (European Wound Management Association – EWMA, 2002).

TRATAMENTUL ZONEI DONATOARE DE GREȘĂ CUTANATĂ CU BIOTITUS® Derma

Utilizarea produselor BIOTITUS® Derma (Compresă impregnată și/sau folie de unguent), în tratamentul zonei donatoare de greșă cutanată, a favorizat vindecarea acesteia, după cum urmează:

Suprafața plăgilor

După 5 zile de tratament, suprafața plăgilor s-a redus la jumătate.

După 10 zile de tratament, toate plăgile incluse în zona donatoare de greșă cutanată, evaluate, s-au vindecat.

Caz clinic
Pacientul TE, 63 ani, cu domiciliu urban, pensionar, i s-a creat o plagă în zona donatoare de greșă cutanată în zona ischiului.

Inițial, plaga a avut o suprafață de 50 cm².



Plaga a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguent BIOTITUS® Derma. Inițial sfinț, ulterior, o dată la 3 zile.

După 2 zile de tratament, se observă decolarea peștii de granulație.



După 5 zile de tratament, suprafața plăgii s-a redus la 50% din cea inițială, prin decolarea peștii de epitelizare (de culoare roșie).



EFICIENȚĂ, SIGURANȚĂ ȘI CONFORT ÎN TRATAMENTUL ZONEI DONATOARE DE GREȘĂ CUTANATĂ ȘI AL PLĂGILOR DEHISCENTE



TRATAMENTUL PLĂGILOR DEHISCENTE CU BIOTITUS® Derma

Dehiscențele postoperatorii a plăgilor poate fi cauzată de o mare varietate de factori, cum ar fi: infecția, obstrucția, fumatul sau nutriția inadecvată a bolnavului și, după ce este tratată poate cauza întârzierea vindecării plăgii și implicit, prelungirea perioadei de spitalizare.

Produsele BIOTITUS® Derma și-au dovedit eficiența în tratamentul acestor tipuri de plăgi, după cum urmează:

Volumul plăgilor dehiscențe

După 6 zile de tratament, volumul plăgilor s-a redus la jumătate.

După 14 zile de tratament, volumul s-a redus cu 98%.

Infecția plăgilor dehiscențe

După 9 zile de tratament, infecția s-a diminuat semnificativ.

După 14 zile de tratament, infecția s-a redus la jumătate.

După 31 zile de tratament, infecția s-a redus în totalitate.

Caz clinic

Pacientul VA, 65 ani, de sex feminin, cu domiciliu urban, are, s-a prezentat la unitatea spitalicească cu o plagă dehiscență, vechi de 20 de zile, la gamba stângă. Dehiscența a fost cauzată de infecția cu Pseudomonas aeruginosa (Pseudos).

De remarcă faptul că pacientului nu i-a fost administrat niciun tratament medicamentos, plaga fiind îngrijită doar cu produse BIOTITUS® Derma.

Inițial, plaga a prezentat o adâncime maximă de aprox. 1 cm și o suprafață de 20 cm².



Plaga a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-a aplicat unguent BIOTITUS® Derma.

După 6 zile de tratament, infecția plăgii s-a diminuat semnificativ.



După 15 zile de tratament, infecția s-a redus la jumătate.



După 29 zile de tratament, infecția s-a redus în totalitate.



Plaga a fost curățată cu ser fiziologic, după care s-a aplicat sfinț unguent BIOTITUS® Derma.

Îndepărtarea pansamentului adirect cu unguentul BIOTITUS® Derma s-a realizat fără ca pacientul să perceapă durere (ero, pe călele Wong-Baker).

Schimbarea pansamentelor realizate cu BIOTITUS® Derma s-a realizat cu durere minimă, fără a traumatiza plaga și fără să afecteze țesuturile nou-formate.

În ambele cazuri, pansamentul s-a realizat prin aplicarea unui strat uniform de unguent, pe o compresă sterilă din tifon, ulterior, aceasta fiind aplicată direct pe plagă.



Produsele BIOTITUS® Derma asigură un microclimat favorabil dezvoltării prin stimularea celulară epitelială, a keratinocitelor și a celulelor endoteliale, accelerarea vascularității de reformată și traseelor de vindecare normale, fiziologice (proliferarea celulară în mediu umed), prevenind apariția microbolilor. Managementul eficient al evoluției din timpul tratamentelor a determinat îndepărtarea secrețiilor în ecos prin combinația secrețiilor cu unguentul, prin absorbția și prin menținerea unui echilibru hidroscopic.

Nu sunt necesare precauții speciale în ceea ce privește produsele BIOTITUS® Derma, cu excepția situației în care pacientul este alergic la una din componentele unguentului.

Distribuit de DISPOMEDFARM

www.dispomedfarm.ro

office@dispomedfarm.ro

Tel.: 0342-220.200. Fax: 0342-220.201

Mobil: 0737-245.510; 0747-136.546



MERU ALĂTURI DE TINE!

Mai 2015

MF Ziarul Medicului de Familie

BIOTITUS® ȘI EVOLUȚIA VINDECĂRII PLĂGILOR



Procesul de vindecare a plăgilor are loc, în general, prin parcurgerea următoarelor faze inflamatorii, faza de granulație, faza de epitelizare și de remodelare.

MODUL DE ACȚIUNE A PRODUSELOR Biotitus® Derma ÎN FAZA ÎNFLAMATORIE

În faza plăgii, există evoluție în cantități variabile care conține celule moarte, fragmente de țesut, materiale străine și bacterii. Dacă în plăgă există o mare cantitate de esuturi, procesul de vindecare este împiedicat atât mecanic, dar și biologic. E. mod. de vindecare este. Unguentul Biotitus® Derma favorizează vindecarea, datorită

Proprietăților antiinflamatorii

Acțiunii de absorbție antibiotică

Se meliorază faza și cu durerea micșorată datorită acțiunii optime a unguentului. În același timp, unguentul Biotitus® Derma conține elemente cu proprietăți lubrifiante și absorbante.



Debridarea antibiotică a unei răni de gradul III, după 2 zile de tratament cu produsele Biotitus® Derma

Absorbția excelentă de esuturi datorită texturii fine și a capacității de absorbție a surselor compoziției impregnate.


MODUL DE ACȚIUNE A PRODUSELOR Biotitus® Derma ÎN FAZA DE GRANULAȚIE

În faza de microcirculație, menținem țesut echilibrat și mediul țesut, care este factor important pentru formarea țesutului de granulație. Vindecarea este accelerată atât de uscare plăgi, cât și de exudat de esuturi.

Unguentul Biotitus® Derma favorizează vindecarea, datorită lipizării sale.

Antioxidanții microcirculației asigură necesarul pentru stricta protejere a țesutului, asigură, astfel, gloriile, protejerea A, vitaminele C și E. Acestea sunt necesare pentru producerea de colagen, componentul principal al țesutului de granulație și un component de țesut al țesutului de esuturi.

Favorizează dezvoltarea rapidă a țesutului de granulație prin stimularea celulelor epiteliale, a keratinocitelor și a celulelor endoteliale prin restabilirea bazei lipice a țesutului și prin producerea de colagen și elastină.

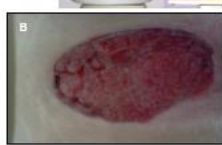

Figură A - aspect inițial; B - aspect de granulație după o lună de tratament cu produsele Biotitus® Derma

Ne aderă la plăgi - permeabil pentru E. schimbă fără durere (asigurând un confort sporit pacientului) și fără traumatizarea țesutului de granulație neo-format.



Indicațiunea permanentă aplicată cu compresă impregnată Biotitus® Derma de pe o rană de gradul II

MODUL DE ACȚIUNE A PRODUSELOR Biotitus® Derma ÎN FAZA DE EPITELIZARE

Formarea țesutului de granulație și asigurarea mediului țesut la suprafața plăgi sunt necesare pentru o epitelizare optimă. Permeabilitatea țesutului asigură în continuare mediul țesut.

Dacă în plăgă continuă să rămână necroză în esuturi, celulele epiteliale sunt îndepărtate și se usucă. Dacă plăgă este prea uscată, se formează crusta care împiedică regenerarea, deoarece celulele epiteliale nu pot penetra în esuturi.

Permeabilitatea hidrolitică, așezătoare (care este și celelalte produse Biotitus® Derma) sunt necesare în această fază pentru a proteja suprafața plăgi împotriva uscării și a proteja celulele epiteliale împotriva aderării în timpul schimbării permeabilității.

Produsele Biotitus® Derma favorizează epitelizarea, datorită lipizării sale.

Asigură mediul uscat

Stimulează regenerarea celulelor

Favorizează formarea de colagen și elastină datorită conținutului în esuturi și acid hialuronic

Favorizează formarea țesuturilor elastice datorită vitaminei E, acizilor grași și componentelor lipice (steroidi, flavonoide, leucine, acizi fenolici)



Figură A - aspect inițial; B - epitelizarea plăgi după o lună de tratament cu produsele Biotitus® Derma

MODUL DE ACȚIUNE A PRODUSELOR Biotitus® Derma ÎN FAZA DE REMODELARE

Unguentul Biotitus® Derma previne formarea cicatricilor hipertrofice prin acțiunea și controlul fazei anterioare de procesul de vindecare și prin menținerea unui echilibru normal între fibroblaste și celulele epiteliale. În faza de epitelizare, celulele necesare migrează celulele epiteliale sunt îndepărtate de mediul uscat asigurând o epitelizare Biotitus® Derma, care se realizează în o epitelizare rapidă cu rezultate superioare din punct de vedere cosmetic.

CONCLUZII

Produsele Biotitus® Derma sunt dispozitive medicale de clasa IIA, înregistrate la Serviciul Național de Regim al Medicamentului din România.

Produsele Biotitus® Derma sunt evaluate în ceea ce privește siguranța, în conformitate cu ISO 14155.

Produsele Biotitus® Derma oferă plăgi în toate fazele procesului de vindecare a plăgilor, prin crearea unui microclimat favorabil vindecării și prin asigurarea microcirculației necesare pentru procesul de vindecare.

Produsele Biotitus® Derma sunt un instrument valabil în lupta împotriva agenților patogeni care pot forma biofilme, responsabile de întârzierea vindecării plăgilor cronice.

Produsele Biotitus® Derma asigură o bună protecție de vindecare a plăgilor, pentru completarea tratamentului se poate aplica la țesuturile chirurgicale (ex. grefa de piele).

Utilizarea produselor Biotitus® Derma a demonstrat faptul că timpul de vindecare și costurile tratamentului per pacient, sunt reduse cu până la 30%.

Distribuit de DISPOMEDFARM
www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro
Tel.: 0342.220.200. Fax: 0342.220.201
Mobil: 0737.245.510; 0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE!

August 2015

Formula AS



Nr. 1156 , 06.03.2015 - 12.03.2015
 [Numarul curent](#)
[Arhiva](#)
[Abonamente](#)
[Publicitate](#)
[Newsletter](#)
[Contact](#)

[Asul de inima](#)
[Lumea romaneasca](#)
[Medicina naturii](#)
[Spiritualitate](#)
[Enigme](#)
[Sanatate](#)
[Medicina populara](#)

[Cauta](#)

[Formula AS](#) > [Arhiva](#) > [Anul 2012](#) > [Numarul 1025](#) > [Medicina naturii](#) > [De la medicina strămoșească](#)

Recomandari





Medicina naturii

Cum trebuie să ne rugăm?

La ce fel de rugăciuni răspunde Dumnezeu. Cum să primim răspuns.

De la medicina strămoșească la medicina modernă -BIOTITUS(R) Derma

OFENSIVA MEDICAMENTELOR NATURISTE ROMÂNEȘTI

** O rețetă strămoșească devine un produs medical românesc de recunoaștere internațională, în domeniul arsurilor, rănilor și al altor afecțiuni ale pielii **

Ați avut cu toții ocazia să vă ardeți (la propriu). Știm bine cât de dureroasă este o arsură. Dar cei mai mulți dintre dumneavoastră nu își pot imagina ce înseamnă o arsură gravă de gradul II sau III, și, mai ales, cum te simți când te scoli dimineața și ți-e groază să te uiți în oglindă sau la mâinile și picioarele tale acoperite de răni oribile. Suferințele provocate de arsură sunt nu numai fizice. De cele mai multe ori, atunci când rănilor sunt grave, cicatricile rămase generează o suferință psihică care marchează pacientul





...Cititorii raspund

Accente

Asul de inima

Buletin informativ

Cititorii intreaba...

Cititorii multumesc pentru

PROMOVARE

E. REVISTE SI SUPLIMENTE MEDICALE DE SPECIALITATE



Formula AS

DE LA MEDICINA STRAMOSEASCA
LA MEDICINA MODERNA



Intorcarea la natura



Unguentul BIOTITUS Derma are in componenta
produse si excipienti 100% naturale, 100% romanesc.



Eficienta dovedita clinic in tratamentul
ARSURILOR si al altor leziuni ale pielii



aspect initial dupa 14 zile de
tratament

PROPRIETATI TERAPEUTICE:

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse.

FARMACII PARTENERE:



Distribuit de DISPOMEDFARM — www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro — fax: 0342.220.201
tel: 0342.220.200 — mobil: 0737.245.510/0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE

DE LA MEDICINA STRAMOSEASCA
LA MEDICINA MODERNA



Intorcarea la natura



Unguentul BIOTITUS Derma are in componenta
produse si excipienti 100% naturale.



Eficienta dovedita clinic in tratamentul
ULCERATIILOR si al altor leziuni ale pielii



aspect initial dupa doua luni
de tratament

PROPRIETATI TERAPEUTICE:

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse.

FARMACII PARTENERE:



Distribuit de DISPOMEDFARM — www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro — fax: 0342.220.201
tel: 0342.220.200 — mobil: 0737.245.510/0747.136.546



MEREU ALĂTURI DE TINE

DE LA MEDICINA STRAMOSEASCA
LA MEDICINA MODERNA



Intorcarea la natura



Unguentul BIOTITUS Derma are in componenta
produse si excipienti 100% naturale.



Eficienta dovedita clinic in tratamentul
ESCARELOR si al altor leziuni ale pielii



aspect initial dupa trei luni
de tratament

PROPRIETATI TERAPEUTICE:

- ⇒ scurteaza timpul necesar vindecarii;
- ⇒ elimina riscul de infectare;
- ⇒ nu determina efecte adverse.

FARMACII PARTENERE:



Distribuit de DISPOMEDFARM — www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro — fax: 0342.220.201
tel: 0342.220.200 — mobil: 0737.245.510/0747.136.546



Ianuarie 2015

Februarie 2015

Martie 2015

PROMOVARE

E. REVISTE SI SUPLIMENTE MEDICALE DE SPECIALITATE



Formula AS



TRADIȚIA PUSĂ ÎN VALOARE DE MEDICINA MODERNĂ
PRODUSE NATURALE SIGURE ȘI EFICIENTE

Dragă cititorule, articolul de față își propune să îți rețină atenția și, dacă se poate, să-ți stărnească interesul în ceea ce privește una dintre cele mai sigure și eficiente modalități de tratament al rănilor și al diferitelor afecțiuni ale pielii, cu ajutorul produselor BIOTITUS® Derma.

Ce sunt produsele BIOTITUS® Derma

Produsele BIOTITUS® Derma sunt dispozitive medicale, conform reglementărilor naționale și internaționale în domeniu; acestea fiind produse naturale, nu produse naturiste!

Proprietățile produselor din această gamă sunt asigurate de unguentul BIOTITUS® Derma care este folosit ca atare, în tuburi cu diferite cantități, dar și pentru impregnarea unui suport absorbant, caz în care avem de-a face cu compresa impregnată.

Unguentul BIOTITUS® Derma este alcătuit dintr-o combinație unică de ingrediente naturale (brevetată internațional): oară, ulei de floarea soarelui, ulei de măsline, ulei de ricin, bismut, colofoniu și camfor, fiecare dintre acestea având efecte deosebite benefice asupra vindecării pielii lezate, așa cum vom arăta mai jos.

Proprietățile produselor BIOTITUS® Derma



Ceara de albine este folosită încă din cele mai vechi timpuri în tratamentul rănilor și pentru îngrijirea pielii, având proprietăți antiseptice și emoliente.



Homer a numit uleiul de măsline ca fiind „lichidul de aur”, pentru popoarele mediteraneene, acesta este mai mult decât un aliment. Uleiul de măsline conține gliceride, acizi grași, steroli, vitamina A, etc., toate implicate în regenerarea celulară, stimulând refacerea țesuturilor afectate, având totodată și proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii.



sub formă de pudră. Subgalatul de bismut este folosit de o lungă perioadă de timp în tratamentul plăgilor deschise, al gingivitelor, datorită proprietăților sale hemostatice, oprind sângerarea.

Combinația ingredientelor de mai sus, asigură proprietăți unice produselor BIOTITUS® Derma, după cum urmează:

- previne infectarea plăgilor, datorită acțiunii antibacteriene și antiseptice;
- asigură îndepărtarea țesuturilor moarte (necrozate) din plagă, fără a fi necesară îndepărtarea acestora pe cale chirurgicală;
- protejează pielea din jurul plăgii, prevenind maoarea.

Istoricul produselor

De ce să folosim BIOTITUS® Derma?

Produsele BIOTITUS® Derma au fost dezvoltate de producătorul BIOTIFARM SRL România, ca răspuns la nevoile pacienților, pe de o parte și la nevoile utilizatorilor (persoanelor medicale).

Astfel, beneficiile pacienților care folosesc BIOTITUS® Derma, constau în:

- siguranță în utilizare: înainte de punerea lor pe piață, produsele au fost supuse mai multor teste de laborator, pentru a fi dovedită compatibilitatea acestora cu țesuturile umane;
- eficiență deosebită în tratamentul plăgilor acute (arsuri, tăieturi, mușcături, etc.) și cronice (ulcerații venoase, diabetice, escare). Astfel, conform datelor obținute în urma testării produselor BIOTITUS® Derma pe pacienți umani (potrivit normelor internaționale recunoscute în domeniu), timpul de vindecare a plăgilor se reduce cu până la 30%;
- rezultate spectaculoase în ceea ce privește calitatea vindecării (epitelizării), fapt deosebit de important în cazul pacienților cu arsuri localizate la nivelul feței și/sau toracelui, dar nu numai;
- confort sporit pentru pacient, datorită faptului că pansamentele alcătuite cu produsele BIOTITUS® Derma nu se lipește de plagă, îndepărtarea acestora realizându-se fără durere.

- tratamentul local al cicatricilor patologice;
- tratamentul local în zona donatoare de grefă cutanată;
- tratamentul local al eczemelor, dermatitelor de contact, psoriazisului și al radiodermatitelor;
- tratamentul local post-peeling chimic sau cu laser.

Cum se folosesc produsele BIOTITUS® Derma

Modul de folosire a produselor BIOTITUS® Derma nu este complicat; în principiu, după ce plagă a fost curățată cu ser fiziologic, compresa impregnată se aplică direct pe aceasta, într-un singur strat, peste care se aplică o compresă sterilă din tifon sau nețesut. Pansamentul astfel format, se fixează cu ajutorul benzilor adezive, tip leucoplast sau cu o față din tifon.

antibacteriene și antiinflamatorii.



Uleiul de floarea-soarelui, pe lângă gliceride, conține vitamina K (aceasta stimulează creșterea celulelor) și acid oleic, care asigură regenerarea celulelor pielii. De asemenea, uleiul de floarea-soarelui are acțiuni antiinflamatorii.



Uleiul de ricin a fost folosit în scopuri terapeutice în Grecia antică, Egipt, India, etc., datorită proprietăților antibacteriene, emoliente și cicatrizante. Acesta conține acid linoleic, palmitic și acid oleic, cu rol în regenerarea celulelor pielii și în biosinteza membranei celulare.



Colofoniul se obține prin incizii practice în trunchiul unor specii de conifere, având proprietăți antiseptice și stimulând circulația sângelui la nivel local, cu efect benefic asupra vindecării rănilor.



Camforul este distilat din lemnul arborelui de camfor fiind un antiseptic și antiinflamator natural, având efect astringent și analgezic, care ajută la calmarea pielii și la reducerea eritemului.



Bismutul este un mineral, fiind introdus în compoziția unguentului BIOTITUS® Derma

Istoricul produselor BIOTITUS® Derma

Începând cu anul 2010, când produsele BIOTITUS® Derma au obținut autorizarea de punere pe piață (prin obținerea marcajului european de conformitate, CE), acestea au fost folosite cu succes în mai multe unități specializate din România, în cadrul secțiilor de chirurgie plastică și reparatorie, chirurgie generală, chirurgie maxilo-facială, ortopedie, dermatologie, printre care enumerăm:

- Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Bagdasar-Arseni București”;
- Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, București;
- Spitalul Clinic Județean Nr. 1, Timisoara;
- Spitalul Clinic Municipal Timisoara;
- Spitalul Județean de Urgență, Constanța;
- Spitalul Județean de Urgență, Craiova.

De asemenea, produsele BIOTITUS® Derma sunt folosite în mai multe clinici din țară, dar și la domiciliu, de către pacienți, prin cumpărarea din farmacii sau care distribuitorul DISPOMEDFARM SRL România are contract de distribuție.

Tot începând cu anul 2010, produsele sunt comercializate în Germania, Italia, Grecia, Serbia, etc.

Indicațiile produselor BIOTITUS® Derma

Produsele BIOTITUS® Derma sunt indicate în:

- tratamentul local al arsurilor de gradul I, II și III;
- tratamentul local al plăgilor acute: tăieturi, dembrăzuri, escoriații, etc.;
- tratamentul local al leziunilor de decubit, al ulcerelor vasculare cronice și al ulcerărilor diabeticilor;

benzilor adezive, tip leucoplast sau cu o față din tifon.

În cazul plăgilor extinse, pot fi folosite mai multe comprese impregnate BIOTITUS® Derma poziționate de așa manieră, încât marginile lor să se suprapună pe o zonă de 6 – 8 mm.

În situația folosirii unguentului BIOTITUS® Derma ca atare, din tub, după curățarea plăgii, acesta este aplicat într-un strat uniform de 1 – 2 mm, pe toată suprafața plăgii, după care se acoperă cu o compresă sterilă din tifon sau nețesut și se fixează în mod similar ca în cazul compresei impregnate.

Pansamentele alcătuite cu produsele BIOTITUS® Derma sunt schimbate, inițial, o dată la 1 – 2 zile, apoi, pe măsură ce procesul de vindecare a plăgii avansează, pansamentele se schimbă mult mai rar; o dată la 3 – 4 zile.

În loc de încheiere

Sperăm ca cele prezentate mai sus să vă rețină atenția; bineînțeles că vă dorim din toată inima, sănătate și cât mai puține incidente care să vă aducă drept urmare o vătămare a dumneavoastră. Însă, vă rugăm să nu uitați că, la nevoie, vă rugăm să luați dispoziție, atât cu produsele BIOTITUS® Derma, cât și cu recomandările și sfaturile de care considerați că aveți nevoie.

Pentru noi, sunt deosebit de importante opiniile dumneavoastră referitoare la produsele BIOTITUS® Derma pe care le-ați folosit, la cum au răspuns acestea așteptărilor dumneavoastră, toate acestea făcând parte din sistemul nostru de supraveghere a pieței.

Vă asigurăm de înțelegerea noastră disponibilă cu privire la orice întrebare sau nelămurire referitoare la produsele distribuite de noi.

Petre Berechet-Comănescu
Director Marketing
DISPOMEDFARM SRL, România

Distribuitor de DISPOMEDFARM – www.dispomedfarm.ro – office@dispomedfarm.ro
tel: 0342.220.200 – fax: 0342.220.201 – mobil: 0737.245.510/0747.136.546

Mai 2015

Formula AS



Chiar și astăzi produsele care asigură mediul umed, favorabil vindecării plăgilor, sunt puțin folosite în practică, deși conceptul este vechi de **40** de ani!

NATURAL MODERN



BIOTITUS[®] Derma reprezintă o gamă hidroactivă de produse (comprese impregnate și tuburi cu unguent) ce oferă soluții în toate fazele de vindecare a plăgilor

Pentru stabilirea pansamentului ideal necesar tratamentului unei plăgi, decizia medicului trebuie să se bazeze nu numai pe o anumită funcție a acestuia sau pe o particularitate anume a plăgii, ci pe evaluarea pacientului și nevoile multifactoriale asociate.

În anul 2008, Thomas a stabilit și publicat cerințele referitoare la performanțele unui pansament ideal, care încă nu a fost descoperit. Din 14 cerințe, **BIOTITUS[®] Derma** îndeplinește 10, adică 70%, ceea ce dovedește faptul că produsele sunt de ultimă generație.

Produsele nu conțin substanțe toxice sau iritante, conform studiilor de biocompatibilitate efectuate de producător

BIOTITUS[®] Derma produce durere minimă la aplicare și la îndepărtarea de pe plagă (durere care poate fi ignorată)

BIOTITUS[®] Derma nu eliberează fibre în plagă (datorită structurii suportului compresei impregnate)

Produsele mențin plaga la un pH și o temperatură optime (pH neutru; temperatura este menținută în jurul valorii de 36 grade C)

Produsele formează o barieră efectivă împotriva bacteriilor, datorită proprietăților antibacteriene ale unguentului

BIOTITUS[®] Derma asigură curățarea (debridarea autolitică) a plăgii, fără durere. Procesul constă în îndepărtarea țesuturilor necrozate

BIOTITUS[®] Derma menține plaga și pielea peri-lezională într-o stare optimă, împiedicând atât uscarea, cât și macerarea

Produsele sunt hemostatice (datorită bismutului), oprind sângerările minore (în combinație cu pansamentul secundar)

Schimbarea pansamentelor se efectuează cu frecvență scăzută, în medie o dată la 2-3 zile

BIOTITUS[®] Derma nu cauzează traume la schimbarea pansamentului (produsele nu aderă la plagă)

PROMOVARE

E. REVISTE SI SUPLIMENTE MEDICALE DE SPECIALITATE



“Sanatatea Conteaza”

BIOTITUS®
Derma

Eficiența dovedită clinic în
tratamentul

ULCERATIILOR

și al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI
TERAPEUTICE

- ⇒ scurtează timpul necesar vindecării;
- ⇒ elimină riscul de infecție;
- ⇒ nu determină efecte adverse, cu excepția pacienților alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ îndepărtarea pansamentului fără durere;
- ⇒ asigură o epitelizare de calitate superioară.



Unguentul BIOTITUS® Derma are în compoziție
extracte naturale din plante și excipienți:

- ceară,
- ulei de masline,
- ulei de floarea soarelui,
- ulei de ricin,
- camfor,
- gum rosin,
- bismut.

Distribuit de
DISPOMEDFARM

www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro
Fax: 0342.220.201
Tel.: 0342.220.200
0737.245.510
0747.136.546



Produse disponibile în farmacii din întreaga țară.

MEREU ALĂTURI DE TINE!

BIOTITUS®
Derma

Eficiența dovedită clinic în
tratamentul

ARSURILOR

și al altor leziuni ale pielii

PROPRIETATI
TERAPEUTICE

- ⇒ scurtează timpul necesar vindecării;
- ⇒ elimină riscul de infecție;
- ⇒ nu determină efecte adverse, cu excepția pacienților alergici la unul din ingrediente;
- ⇒ îndepărtarea pansamentului fără durere;
- ⇒ asigură o epitelizare de calitate superioară.



Unguentul BIOTITUS® Derma are în compoziție
extracte naturale din plante și excipienți:

- ceară,
- ulei de masline,
- ulei de floarea soarelui,
- ulei de ricin,
- camfor,
- gum rosin,
- bismut.

Distribuit de
DISPOMEDFARM

www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro
Fax: 0342.220.201
Tel.: 0342.220.200
0737.245.510
0747.136.546



Produse disponibile în farmacii din întreaga țară.

MEREU ALĂTURI DE TINE!

BIOTITUS®
Derma

Igazolt klinikai hatékonyság a

FELFEKVÉSEKRE

és egyéb bőrsérülésekre

Gyógyászati
tulajdonságok:

- ⇒ csökkenti a gyógyulás időtartamát;
- ⇒ kiküszöböli a fertőzésveszélyt;
- ⇒ nem vált ki ellentétet hatást, kivéve azoknál a betegeknél, akik allergiák valamely összetevőre;
- ⇒ a kötés fájdalom nélküli eltávolítása;
- ⇒ jó minőségű hámszövetképződést biztosít.



A BIOTITUS® Derma krém növényi kivonatokat és
segédanyagokat tartalmaz:

- viasz,
- olívaolaj,
- napraforgó olaj,
- ricinus olaj,
- kámfor,
- gumigyanta,
- bismut.

Distribuit de
DISPOMEDFARM

www.dispomedfarm.ro
office@dispomedfarm.ro
Fax: 0342.220.201
Tel.: 0342.220.200
0737.245.510
0747.136.546



A termékek megtalálhatók az ország gyógyszerüzeteiben.

MEREU ALĂTURI DE TINE!

Editia de Cluj

Editia de Mures

Editia de Harghita
(in limba maghiara)

“Farmacia Ta”

FARMACIA TA

Revista care te mentine sanatos

Categorii ▾

Acasa > Noutati > Produsele Biotitus Derma – panaceu pentru afectiunile dermatologice

Produsele Biotitus Derma – panaceu pentru afectiunile dermatologice



Gama de produse Biotitus Derma, care are la baza o rețeta stramoseasca adaptata si imbunatatita, contine produse de uz dermatologic, recomandate intr-o varietate de situatii, dintre care amintim: toate fazele de vindecare a plagilor, preventia si controlul contaminarii microbiene, tratamentul afectiunilor dermatologice.

Unguentele Biotitus Derma sunt cicatrizante si epitelizante si au o toleranta foarte buna la nivelul pielii. Proprietatile acestora au fost testate clinic de medici chirurghi plasticieni, in urma testelor constatandu-se vindecarea cu 30% mai rapida a plagilor, reducerea timpului de spitalizare, ca si reducerea costurilor de tratament.

Cum actioneaza ingredientele din compozitia produselor Biotitus Derma

Produsele Biotitus Derma contin ceara, trei tipuri de uleiuri – de masline, de floarea-soarelui, de ricin – camfor, guma de colofoniu si bismuth. Prin continutul bogat in vitamine, acizi grasi, gliceride si flavonoide, ingredientele care intra in compozitia acestor produse contribuie la hidratarea celulara, stimuleaza circulatia sangelui la nivelul plagii si regenerarea celulara si formarea de elastina si collagen. Principalele actiuni ale unguentelor Biotitus Derma sunt antiinflamatoare, cicatrizante, calmante.

Indicatiile terapeutice ale produselor Biotitus Derma

Indicatiile terapeutice ale acestei game sunt variate. Unguentele pot fi aplicate atat in spital, de personalul medical, cat si acasa, de pacient, respectand indicatiile medicului curant. Astfel, produsele Biotitus Derma se recomanda in:

- Plagile acute, de tipul arsurilor solare sau arsurilor cauzate de foc, escoriatiilor, ulceratiilor sau plagilor traumatice, si plagile cronice, de tipul escarelor, ulcerelor vasculare cronice;
- Afectiunile dermatologice, precum eczeme umede, dermatite de contact sau psoriazis;
- Cicatricele patologice;
- Tratamentul local post-peeling chimic sau cu laser;
- Tratamentul zonei donatoare de grefa.

In tratamentul acestor tipuri de plagi, unguentele Biotitus Derma au un efect de debridare, adica actioneaza ca un bisturiu chimic care indeparteaza resturile de tesut mort si favorizeaza refacerea tesutului sanatos.

Produsele Biotitus Derma previn contaminarea microbiana

Preventiv, unguentele Biotitus Derma si-au dovedit utilitatea in controlul contaminarii microbiene. Acestea impiedica dezvoltarea a numeroase tipuri de bacterii, dintre care: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus gr. A*, *Enterococcus*, *E. Coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter* si a doua dintre cele mai raspandite tipuri de ciuperci: *Candida albicans* si *Aspergillus niger*. De asemenea, unguentele distrug unele bacterii periculoase, precum *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus gr. A*.

In aceste situatii, unguentul Biotitus Derma actioneaza asupra plagilor infectate cu bacterii ajutand marginile plagilor sa se apropie si redand elasticitatea tesutului cicatricial.

Disponibila in farmaciile



“Farmacia Ta”

Biotitus Derma

Ajută la vindecarea rănilor

Unguentul este foarte eficient și în tratarea ulcerului de gambă și a piciorului diabetic, în ceea ce privește scurtarea timpului necesar vindecării și a epitelizării de calitate. Se aplică în strat uniform de 1-2 mm pe suprafața rănii, după care se acoperă cu un pansament steril.

Disponibil la



februarie 2014 FARMACIA TA

37

“Galenus”

34

Galenus ■ Octombrie 2014

Practică medicală

BIOTITUS Derma – unguent pentru tratarea plăgilor acute și cronice

BIOTITUS Derma este un unguent cu efecte dovedite în tratarea mai multor tipuri de afecțiuni la nivelul pielii în mediul umed, oferind soluții în toate fazele de vindecare a plăgii. Compoziție: ceară, ulei de măsline, ulei de floarea-soarelui, ulei hidrogenat de ricin, bismut subgalat, rășină și camfor.

Biotitus Derma este indicat în tratarea plăgilor acute (arsuri de gradul I, IIa și IIb, escoriații, ulceratii, alte plăgi traumatice și alte leziuni ale pielii), plăgilor cronice (escare, ulcere vasculare cronice), afecțiunilor dermatologice (tratamentul local în eczeme umede, dermatite de contact, psoriazis, radiodermatite), cicatricilor patologice (hipertrofice, cheloide). De asemenea, Biotitus Derma este util în tratamentul local post-peeling chimic sau cu laser și în tratamentul local în zona donatoare de grefă cutanată.

Unguentul stimulează apariția țesutului de granulație și favorizează cicatrizarea prin stimularea celulelor epiteliale, a keratinocitelor și a celulelor

endoteliale, prin reinstalarea barierei lipidice a pielii și a producției de collagen și elastină; favorizează epitelizarea chiar și în cazul leziunilor profunde prin stimularea rezervelor de celule epiteliale restante; accelerează vascularizația de neoformație; are efect antiinflamator.

Unguentul Biotitus Derma asigură prevenția și controlul contaminării microbiene. Are efect bacteriostatic asupra: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus gr.A*, *Enterococcus*, *E. Coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter aerogenes*, *Providentia stuartii*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*. Este un bactericid puternic în cazul contaminării cu *Staphylococcus aureus* și *Streptococcus pyogenes gr.A* și are efect antifungic asupra *Candida albicans* și *Aspergillus niger*.

Biotitus Derma este produs de BIOTIFARM și este un dispozitiv medical clasa IIb. În prezent, produsul se află în studii clinice efectuate în mai multe spitale din țară.

Ziarul Europeanul, Arad 2014

EUROPEANUL

Director
Daniel Albu

Anul VII - Nr. 284 10 noiembrie 2014 Ziar săptămânal regional Se distribuie gratuit europeanul.eu@gmail.com
www.europeanul.eu

„Produsele BIOTITUS® Derma, HemoTreat® și BIOTIvet sunt 100% pe bază naturală”

Dialog cu Florea Iacob, General Manager al SC DISPOMEDFARM SRL, unic distribuitor în România al produselor BIOTITUS® Derma



Florea Iacob, General Manager al SC DISPOMEDFARM SRL, unic distribuitor în România al produselor BIOTITUS® Derma

– Ce produse ați prezentat la Târgul AR MEDICA?

– La Târgul AR MEDICA am venit cu trei produse 100% naturale: BIOTITUS® Derma - tratează plăgile acute, cronice și

afecțiunile dermatologice; HemoTreat® - tratează hemoroidii, fiind unul dintre cele mai bune produse care au intrat recent pe piață, iar al treilea este BIOTIvet, care este un produs

pentru uz veterinar și tratează plăgile la animale.

– De ce sunt produsele prezentate de d-voastră mai bune față de altele aflate pe piață?

– Așa cum arată și studiile,



produsele noastre sunt 100% pe bază naturală și nu conțin nici un alt produs chimic. Viața de astăzi ne demonstrează că produsele naturale sunt cele mai bune în tratarea afecțiunilor.

– De unde pot fi achiziționate cele trei produse: BIOTITUS® Derma, HemoTreat® și BIOTIvet?

– BIOTITUS® Derma se găsește în toate farmaciile CATENA. În ceea ce privește, HemoTreat® pe moment este un produs nou intrat pe piață, dar

în cel mai scurt timp va putea fi găsit în toate lanțurile naționale de farmacii. Deocamdată, poate fi găsit pe site-urile noastre: www.dispomedfarm.ro și pe site-ul producătorului. Din punctul meu de vedere, prețurile noastre sunt foarte accesibile, mai ales în situația în care produsul își dovedește eficiența. În condițiile în care produsele își realizează cu bine efectele și clientul este mulțumit, atunci eu consider că prețul este unul accesibil.

Daniel Albu

PROMOVARE

F. APARITII TV



Emisiunea “Doctorul tau de weekend” difuzata pe National24 TV



In prezent, **DISPOMEDFARM** este in curs de a realiza un **spot audio** si un **spot video** cu *Tonica Group*, in vederea difuzarii acestora pe posturi nationale de radio si televiziune.

DISTRIBUTIA produselor



In urma promovarii prin formele aratate mai sus, distributia produselor din gama **BIOTITUS® Derma** la nivel national este in prezent asigurata prin lanturile de farmacii

Catena (461 farmacii),
Sensiblu (418 farmacii),
1.000 farmacii independente
din intreaga tara.

LISTA DE PRETURI

Nr. crt.	Denumire produs	Pret (lei)	T.V.A. (lei)	Valoare cu T.V.A. (lei)
1	BIOTITUS® DERMA – TUB UNGUENT 20 ML	36,00	8,64	44,64
2	BIOTITUS® DERMA – TUB UNGUENT 50ML	51,00	12,24	63,24
3	BIOTITUS® DERMA – TUB UNGUENT 100 ML	93,00	22,32	115,32
4	BIOTITUS® DERMA – TUB UNGUENT 500 ML	380,60	91,34	471,94
5	BIOTITUS® DERMA – COMPRESSE IMPREGNATE (CUTIE 10 BUCATI)	174,00	41,76	215,76

VA
MULTUMIM!